

Haavanhoitotuotteet

Hankintakausi 1.4.2022 – 31.3.2024

haavahoitaja Marja-Leena Peltonen
haavahoitaja Evelina Hammarström
haavahoitaja Mari Isosomppi

Kirurgian- ja ortopedian poliklinikka
malla.peltonen@hyvaep.fi

Sisällys

Acticoat Flex 3	55	Eakin- haavapussi	90	Lampaanvilla	96	Mikrodacyn	6	Sorbact kir. haavasidos	29
Adaptic digit	89	Elastomull Halft	78	Levabon Heel Up	95	Mollelast	80	Sorbact superabsorbent	32
Adhesive Remover	4	Esenta	3	Medihoney Medical Honey	49	Naso Fix	93	Sorbact-geelisidos	27
Aquacel Ag Foam (ei kiin.)	53	Evercare-haavatyyny	62	Medihoney Wound Gel	48	Nenmähaletkun kiinnitys	93	Sorbact-haavatyyny	28
Aquacel Ag Foam (kiin.)	52	Evercare kiinnittyvä sidos	66	Mefix	68	Nobifix elast	76	Sorbact-nauha	23
Aquacel Ag+ Extra	51	Evercare, tukisidos	81	Mepiform	92	Opsite Flexfix Gentle	70	Sorbact-sykerö	24
Aquacel Foam	38	Fixomull skin sensitive	72	Mepilex Ag	58	Opsite Flexfix	69	Sorbact-taitos	25
Aquacel Extra	22	Haavahoitotuotetoimittajat	99	Mepilex Border Flex Lite	42	Päaside (putkisidos)	74	Stocinette Woodcast	82
Askina Calgitrol Paste	50	Haavakauha, susi-kyretti	13	Mepilex Border Flex Oval	44	PolyMem Silver	57	Surgifix Zerolatex	83
Askina Carbosorb	64	Intrasite Gel	16	Mepilex Border Flex	43	PolyMem-sormisidos	34	Tegaderm CHG IV.	93
Avelle	97	IV-kanyylin kiinnitys	93	Mepilex Border Heel	46	PolyWic Silver sormisidos	60	Tubifast Strech	84
Barrier standart gauze (ster.)	9	Jelonet-rasvalappu	19	Mepilex Border Post-Op	47	PolyWic Silver	56	Tubigrip	85
Biatain	37	Katetrin kiinnitys	94	Mepilex Border Sacrum	45	PolyWic	33	UCS-haavapyyhe	7
Biatain Ag	54	Keittosuolaliina (ster.)	10	Mepilex Heel	41	Prontosan	5		
Biopatch (katetrin juureen)	94	Keittosuolaliina (ster.)	9	Mepilex Lite	36	Prontosan Gel	18		
Carefix	74	Kierreharsosidos	76	Mepilex Transfer Ag	59	Prontosan Wound Gel X	17		
Cavilon-ihonsuojasuoihke	15	Kipsivanu	75	Mepilex Transfer	35	Putkisukka	82		
Cavilon-ihonsuojavoide	14	Kliniderm Film	65	Mepilex XT	39	Renasys	98		
Crimpeplast	77	Kliniderm	21	Mepilex	40	Rengaskyretti	12		
Delta Dry Softliner	82	Klinifix cohesive	79	Mepitac	91	Rosidal K	86		
Drain-Fix (dreeneihin)	94	Klinion- hasotaitos	8	Mepitel film	71	Singlefix	88		
Drymax	61	Klinion- kuitutaitos	11	Mepitel	20	Softban	75		
DuoDerm Extra Thin	73	Klinion-harsotaitos (ster.)	8	Mepore IV	94	Sorbact- compress(alipaine)	26		
		Klinion-keittosuolaliina (ster.)	10	Mepore	67	Sorbact Foam	31		
		Laastari	87	Mextra	63	Sorbact Foam Gentle Border	30		

Haavaympäristön hoitoaineet, haavasidosten irrottaminen, liima-aineen poistaja Esenta® (Convatec Oy)



Tuotetiedot

- 100%silikonipohjainen
- Ei sisällä luonnonkumia eikä lateksia
- koko 16 x 12 cm
- yksittäispakattu, 30 pyyhettä/laatikko

Käyttö:

- Liimasidosten irrotukseen tarkoitettu pyyhe

Koot:

1 pyyhe (423281, G105215)

Haavaympäristön hoitoaineet, haavasidosten irrottaminen, liima-aineen poistaja Adhesive Removerihonpuhdistussuihke ® (Tamro Oyj)



Tuotetiedot

- Silikoninen liima-aineenpoistosuihke
- Alkoholiton

Käyttö

- Liimasidosten irrottamiseen

Koot:

50 ml (1005-1, G105215)

Haavan hoitoaineet, Haavan puhdistuslios Prontosan® Iios (Tamro Oyj)



Käyttö

- Akuuttien ja kroonisten haavojen puhdistukseen
- Ehkäisee biofilmin muodostumista
- Ei tarvitse huuhtoa pois
- Voidaan käyttää myös hauteena 10-15 min. ajaksi
- Avattu pullo säilyy 8 viikkoa

Koot:

Pullo 350 ml (400415, G101523-5)

Haavan hoitoaineet, Haavan puhdistuslios Microdacyn60 ® (Steripolar Oy)



Tuoteseloste:

- Ylihapetettu vesi
- valmistettu elektrolyysissä H₂O:sta ja NaCl:sta
- Haavojen puhdistukseen
- Antimikrobinen/ antibakteerinen
- Tuhoaa gram-negatiivisia ja -positiivisia bakteereja, mukaan lukien MRSA, virukset ja itiöt
- Tehooa 30 sekunnissa

Käyttöaiheet ja käyttö:

- Erilaiset haavat, onkalohaavat, nivel ja jänteet, limakalvot
- I-II asteen palovammat
- Silmät, sisäkorva, vatsaontelo
- Haavan huuhteluun ja puhdistukseen, haavakompressiona, huuhtelunesteenä alipaineimuhoidossa
- Ei tarvitse huuhdella pois
- Säilyy avattuna 60 vrk

Koot:

Pullo 500 ml (P-E21T00, G101523)

Haavan hoitoaineet, Haavapyyhe UCS ® - haavapyyhe, yksittäispakattu (OneMed Oy)



Tuotetiedot:

- Pyyhkeen koostumus: vesineulattu kuitukangas
- Vaikuttava aine Poloxamer 188
- Hajottaa biofilmiä ja ennaltaehkäisee sen uudelleen muodostumista
- Poistaa haavalta fibrinikatetta
- Yhteensopiva kaikkien sidosten kanssa
- Yksittäispakattu
- Myyntipakkaus 30 kpl / pkt

Käyttö:

- Kroonisten haavojen puhdistukseen
- Täydentää mekaanista, instrumenteilla tapahtuvaa teräväpuhdistusta
- Soveltuu käytettäväksi interaktiivisten sidosten kanssa

Koot:

1 pyyhe (WCM9515030, G105196)

Taitos, harso

Klinion ® harsotaitos (Mediq suomi Oy)



- Pölyämätön, nukkaamaton, ei rispaannu
- Haavojen puhdistukseen kuivana tai kostutettuna
- Ihonsiirrekohtaan rasvaverkon päälle avattuna, möyheänä
- Ei sovellu imeväksi peittosidokseksi erittävälle haavalle

Koot:

Steriili:	
10x10cm	(111082/1004458, G109040)
Tehdaspuhdas:	
5x5 cm	(1004457, G100398-3)
7,5x7,5 cm	(MLN153300, G100399)
10x10cm	(111098/1004438, G104228)

Keittosuolaliina, harso, steriili, RTG-langallinen Barrier standard gauze® (Mölnlycke Health Care Oy)



- Leikkaussalikäyttöön ja haavahoitoon
- Pölyämätön, nukkaamaton, ei rispaannu
- Haavojen puhdistukseen kuivana tai kostutettuna
- Ihonsiirrekohtaan rasvaverkon päälle avattuna, möyheänä
- Ei sovellu imeväksi peittosidokseksi erittävälle haavalle
- Sidoksessa röntgenpositiivinen merkkilanka

Koot:

10 x10 cm (159160, G100400) (130 kpl)

30 x 45 cm (175260, G100395)

45 x 70 cm (175131, G100396-1)

45 x 70 cm (175160, G104238-2)

Keittosuolaliina, harso, steriili, RTG-langallinen Klinion ® harsotaitos (OneMed Oy)



- Pölyämätön, nukkaamaton, ei rispaannu
- Haavojen puhdistukseen kuivana tai kostutettuna
- Ihonsiirrekohtaan rasvaverkon päälle avattuna, möyheänä

Koot:

- 30x45 cm (ONE492010, G104609)
- 45x70 cm (ONE492012, G104238)

Taitos, kuitu

Klinion ® kuitutaitos (Mediq suomi Oy)



- Soveltuu ihon pyyhkimiseen/ puhdistamiseen kostutettuna esimerkiksi A12T ennen toimenpiteitä
- Ei suositella varsinaiseen haavahoitoon
- haavan puhdistukseen suositellaan harsokankaista harsotaitosta steriilillä tai tehdaspuhdasta

Koot:

Steriili:

5x5 cm	(1005276, G104211)
7,5x7,5cm	(175009/1005275, G104212)
10x10cm	(1005277, G100402)

Tehdaspuhdas:

5x5cm	(1004419, G104229)
7,5x7,5cm	(1004420, G104230)
10x10cm	(1004421, G104227)

Rengaskyretti, terävä, kertakäyttö (WalkMedical Oy)



- kertakäyttöinen, steriili
- ruostumatonta terästä
- terän toinen puoli on terävä ja leikkaava
- terän toinen puoli on tylsä
- yksittäispakattu, laatikossa 20 kpl

Koot:

Rengaskyretti 4mm (MK404, G102769)

Rengaskyretti 7mm (MK407, G102770)

Kauha, kaksipuolinen, kertakäyttö, steriili
SUSI ® kyretti (B. Braun Medical Oy)



- Kertakäyttöinen
- Kaksipuolinen
- 180 mm
- Paketissa 20kpl

1kpl (FK850SU, G111310-1)

Haavaympäristön hoitoaineet, Ihon suojavaoide Cavilon® (Mediq Suomi Oy)



- Ihon suojaaminen virtsalta, ulosteilta ja muilta kehon eritteiltä, liima-aineilta ja hiertymiltä
- Joustaa ja venyy muodostaen vedenpitävän suojauksen
- Kiinnittyy myös kosteaan ja nestettä tihkuvaan ihoon (eli ihoon, jonka pintakerros on osittain kuoriutunut)
- ei heikennä sidosten kiinnittyvyyttä
- Pitkäkestoinen vaikutus
- Soveltuu inkontinenssin aiheuttamaan dermatiittiin (IAD)
- Keskivaikeiden tai vaikeiden ihovaurioiden hoitoon stoomien, letkujen ja dreerien sekä fistelien ympäristössä
- kuivan ja hilseilevän ihon kosteuttamiseen
- Ei imeydy ihoon

Käyttö

- Levitetään ohuelti iholle, haavan reunoille ja ympäristöön ja annetaan kuivahtaa muutamia sekunteja
- Käytetään 2-3 kertaa viikossa
- Liian usein käytettynä kerrostuu iholle

Koot:

92 g tuubi

3392G / G105084-5

Haavaympäristön hoitoaineet, ihon suojasuihke Cavilon® (Mediq Suomi Oy)



- Muodostaa iholle pitkään säilyvän suojan keuhonesteitä/-eritteitä vastaan
 - Suojaa altistunutta ihoa krooniseen inkontinenssiin liittyviltä vaurioilta
 - (IAD)
 - Suojaa tervettä tai vahingoittunutta ihoa liimoilta ja kosteudelta
 - Parantaa sidosten ja teippien kiinnittyvyyttä, kuten esimerkiksi alipaineimusidoksien kiinnittymistä
 - Ei kirvele
 - Ei imeydy ihoon
 - Voidaan käyttää aikuisilla, lapsilla ja yli kuukauden ikäisillä vauvoilla
- Voidaan käyttää myös:
- avanneaukon ympäristö, taiteet, trakeostomiaa ympäröivä iho, teippien aluset sekä talkin sijaan rintojen alle, kainaloihin, nivusiin ja varvasväleihin
- Käyttö:
- Levitetään 24–72 tunnin välein, riippuen siitä kuinka väkeviä ihon kanssa kosketuksiin joutuvat eritteet ovat, ei kuitenkaan useammin kuin 12 tunnin välein
 - Käsittely uusitaan, kun sidos, teippi tai muu liimautuva tuote poistetaan, sillä liima irrottaa suojakalvon.
 - Huomioitava => anna kuivua 20 s ajan

Koot:

28 ml pullo	(3346N, G105085)
Applikaattori 1 ml	(3343N, G112765-1)
Applikaattori 3 ml	(3345N, G112765-2)

Haavageeli, hydrogeeli, steriili Intrasite Gel ® (Smith & Nephew Oy)



- Koostumus: karboksimeetyyliselluloosa-polymeeri, propyleeniglykoli, vesi
- Tehostaa haavalla autolyyttistä puhdistumista hajottamalla katetta
- Pitää haavaa kosteana
- Tehostaa autolyyttistä puhdistumista hajottaen haavakatetta
- 10 tuubia pakkauksessa

Käyttö:

- Suojaamaan haavalla luu-jänne -tai nivelkudosta kuivumiselta
- Kuivalle haavalle optimoimaan haavan kosteustasapainoa
- Katteiselle haavalle hajottamaan, pehmittämään katetta
- Vaatii peittosidoksen

Koot:

15 g (7311, G101527-2)

Haavageeli, hydrogeeli Prontosan Wound Gel X ® (B. Braun Medical Oy)



Ainesosat:

- mikrobeja tuhoavana ainesosana Polyhexanidi, pinta-aktiivinen ainesosa betaiini
- käyttövalmis geeli
- Hajottaa biofilmiä ja estää sen muodostumista
- Pehmittää haavakatetta
- Kosteuttaa haavaa
- avattu pakkaus säilyy 8 viikkoa

Käyttö:

- Akuutit ja krooniset haavat
- infektoituneet haavat
- eriasteiset palovammat
- Kuivat, katteiset haavat
- Suojaamaan jännettä, luuta kuivumiselta

Ei saa käyttää:

- Keskushermoston alueella tai aivo/selkäydinkalvolla
- Keski- tai sisäkorvassa tai silmissä
- Ei hyaliinirustossa tai aseptisissä nivelleikkauksissa
- Ei haavanpuhdistusaineiden, voiteiden, öljyjen, entsyymien tms. kanssa

Koot:

50 g Wound Gel X (017559 / G101523-2)

250g Wound Gel X (017559 / G101523-3)

Haavageeli, hydrogeeli

Prontosan Gel ® (B. Braun Medical Oy)



Ainesosat:

- mikrobeja tuhoavana ainesosana Polyhexanidi, pinta-aktiivinen ainesosa betaiini
- käyttövalmis geeli
- Hajottaa biofilmiä ja estää sen muodostumista
- Pehmittää haavakatetta
- Kosteuttaa haavaa
- avattu pakkaus säilyy 8 viikkoa

Käyttö:

- Akuutit ja krooniset haavat
- infektoituneet haavat
- eriasteiset palovammat
- Kuivat, katteiset haavat
- Suojaamaan jännettä, luuta kuivumiselta

Ei saa käyttää:

- Keskushermoston alueella tai aivo/selkäydinkalvolla
- Keski- tai sisäkorvassa tai silmissä
- Ei hyaliinirustossa tai aseptisissa nivelleikkauksissa
- Ei haavanpuhdistusaineiden, voiteiden, öljyjen, entsyymien tms. kanssa

Koot:

30 ml (400515, G101527)

Haavaverkko, rasva, steriili Jelonet ® (Smith&Nephew)



- Parafiini-rasvaverkkosidos
- Ei sisällä lääkeainetta
- voi leikata

Käyttö:

- Ihonsiirteiden ja parantumassa olevien ihonottokehtien päällä
- Pienet repeämät/haavaumat/nirhaumat/
- hankaumat
- sidos laitetaan haavareunojen yli
- Vaatii peittosidoksen
- Asetetaan haavalle yksinkerroin

Koot:

10 x 10 cm

(7404, G104219)

10 x 40 cm

(7459, G100357)

Haavaverkko, silikon, steriili Mepitel® (Mölnlycke Health Care Oy)



- kaksipuolinen silikonahaavakontaktisidos
- myötäilee ihon pintaa
- joustaa pituus ja leveyssuunnassa
- estää sidoksia tarttumasta haavan pintaan

Käyttö:

- suojana ei-erittäville haavoille, rakkuloille
- ei eritteen imukykyä, vaatii toissijaiseksi sidokseksi harsoja tai haavatyynyn erittävällä haavalla
- voi leikata
- sidos laitetaan haavareunojen yli
- voi olla paikoillaan 14 vrk (jos haava sen sallii)
- päällissidoksia voidaan vaihtaa tarpeen mukaan jättäen haavaverkko paikalleen
- käytetään yksinkerroin

Koot:

5 x 7,5cm	(290510, G104438-4)
7,5 x 10cm	(290710, G104179-4)
10 x 18cm	(291010, G100358-2)
20 x 30cm	(292005, G100359-2)

Haavaverkko, silikon, steriili

Kliniderm® silikoniverkko (Mediq Suomi Oy)



- Yksipintainen silikonihaavakontaktisidos
- Ei eritteen imukykyä
- Lämpäisee eritteen
- Vaatii imevän peittosidoksen, ei kuitenkaan toista silikonipintaista sidosta tai hydrokolloidisidosta
- Ei tartu haavaan ja estää toissijaista sidosta tarttumasta haavan pintaan

Käyttö:

- Pienet nirhaumat, pienet ihovammat/pienet palkeenkielet /pinnalliset ihorepeämät
- Sormien leikkaushaavat/pienet traumahaavat
- leikkaushaavat
- sidos asetetaan haavalle haavareunojen yli
- voi leikata
- Asetetaan haavalle yksinkerroin
- Peittosidos valitaan erityksen mukaan

Koot:

5 x 7,5cm	(1006753, G104438)
7,5 x 10cm	(1006754, G100358)
10 x 18cm	(1006755, G100359)
20 x 30cm	(1006757, G104179)

Haavasidos, geeliiytyvä

Aquacel Extra® nauha/Aquacel Extra® (Convatec Oy)



- Geeliiytyvä hydrofibersidos
- Imee itseensä haavaeritettä

Käyttö:

- Kuivana runsaasti erittäviin haavoihin
- Imutehoa saadaan lisäämällä kerroksia
- Kostutettuna NaCl- kuiviin ja vähän erittäviin haavoihin
- Sidos kutistuu kostuessaan => kuivana sidos asetetaan haavalle hieman haavaa suurempana
- Onkalohaavoille nauhamallinen
- Voi leikata
- Vaatii peittosidoksen

Huomioitava

- tuoreessa *vertavuotavassa* haavassa saattaa tarttua haavan pohjaan => irrotellaan liottamalla

Koot:

1 cm x 45 cm	(420127, G105195)
2 cm x 45 cm	(403770, G100348)
10 x10 cm	(420672, G104796)
15 x 15 cm	(420673, G100350)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact® -nauha (Verman)



- Ei ime itseensä eritettä, vaatii imevän sidoksen päälle
- Sitoo itseensä bakteereita ja sieniä
- Estää bakteerikasvua haavalla
- Voi leikata

Käyttö:

- Haavainfektiot, sieni-infektiot
- Krooniset haavat, kolonisoituneet haavat
- Traumahaavat
- Ihopoimujen sieni-infektiot esimerkiksi nivusalueella (10 cm leveä nauha)
- Onkalohaavat, fistellit
- Vaatii haavalla käytettäessä peittosidoksen
- Peittosidos valitaan erityksen mukaan
- Asetetaan kevyesti onkalohaavalle onkalon pohjaan ulottuen, keskeltä taitettuna niin, että nauhan päät jäävät n. 2cm verran haavan suuaukon ulkopuolelle

Koot:

1 x 50 cm	(98118, G101514)
2 x 50 cm	(98121, G101513)
5 x 200 cm	(98120, G101515)
10 x 200 cm	(98119, G101516)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact® -sykerö (Verman)



- Asetaattisilkkipinta
- Sorbact® - teknologia poistaa bakteereja sieniä

Käyttö:

- pienten syvänteiden hoitoon
- haavan mekaaniseen puhdistukseen

Koot:

Sykerö 3cm (98126, G101521)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact® -taitos (Verman)



- Asetaattisilkkipinta
- Sorbact® - teknologia poistaa bakteereja sieniä sitomalla ne pysyvästi pintaansa
- Vähentää mikrobikuormitusta ja edistää haavan paranemista
- Infektiota ehkäisevä
- Allergiariski on matala
- Ei vapauta mitään vaikuttavia aineita haavaan
- Voi leikata, ei rispaannu
- Vaatii peittosidoksen


Käyttö:

- Krooniset haavat
- Traumahaavat
- Puhtaat tai kontaminoituneet haavat
- Kolonisoituneet tai infektoituneet haavat
- Pinnalliset tai syvät haavat
- Peittosidos valitaan haavaerityksen mukaan

Koot:

7 x 9 cm (98125, G101522)

Haavasidos, hydrofobinen, Alipaineimusidos Sorbact® compress (Verman)

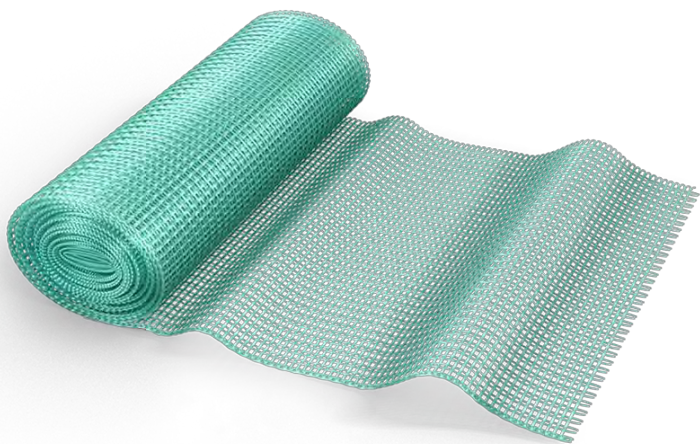

- Asetaattisilkkipinta
- Sorbact® - teknologia poistaa bakteereja sieniä sitomalla ne pysyvästi pintaansa
- Vähentää mikrobikuormitusta ja edistää haavan paranemista
- Infektiota ehkäisevä
- Allergiariski on matala
- Ei vapauta mitään vaikuttavia aineita haavaan
- Voi leikata, ei rispaannu

Käyttö:

- Alipaineimusidoksena harsotaitoksen sijasta tai kontaktipintana alipaine-harsosidoksen tai vaahtosidoksen alla

Koot:

10 x 100 cm

(98124, G112755)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact-geelisidos ® (Verman)



Tuotekuvaus

- Sorbact®-teknologia sitoo bakteerit ja sienet itseensä
- Infektiota ehkäisevä ja hoitava
- Sidoksessa vesipohjainen, karbomeeriä ja propyleeniglykolia sisältävä geeli
- Voi leikata
- Ei rispaannu

Käyttö

- Puhtaat-, kontaminoituneet-, kolonisoituneet-, tai infektoituneet haavat
- Vähän erittävät tai kuivat haavat
- Suojaamaan haavan pohjalla näkyvää luuta, nivelpintaa tai jännettä
- Pinnalliset tai syvät haavat
- Suoraan haavalle
- Vain haava-alueelle, ettei hauduta haavan reunoja ja/tai haavaympäristöä (haavaympäristön suojaus)
- traumahaavat, palovammat, onkalohaavat, fistelit, painehaavat, diabeettiset haavat sekä jalka- ja säärihaavat

Koot:

3 x 15 cm	(98139, G112758)
5 x 15 cm	(98137, G105130)
7,5 x 15 cm	(98136, G105129)
15 x 20 cm	(98180, G112756)
20 x 25cm	(98181, G112757)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact-haavatyyny® (Verman)



- Asetaattisilkkipintainen
- Sorbact®-teknologia sitoo bakteerit ja sienet itseensä, ylläpuolella olevat imukerrokset sitovat haavaeritteen sidokseen
- Voidaan käyttää myös kompressiosidonnalla
- Infektiota ehkäisevä ja hoitava
- Vähän tai kohtalaisen runsaasti erittävillä haavoilla
- Kiinnittymätön, vaatii kiinnityssidoksen
- Ei voi leikata

Käyttö:

- Erilaiset haavat, akuutit ja krooniset
- Asetetaan haavalle vihreä pinta haavaa vasten

Koot:

7 x 9 cm	(98224, G101517)
10 x 10 cm	(98222, G101519)
10 x 20 cm	(98223, G101520)

Haavasidos hydrofobinen, steriili Sorbact® kirurginen haavasidos (Verman)




- Sorbact- teknologiaan perustuva hydrofobinen kiinnittyvä haavasidos
- Leikkaushaavan infektion ehkäisy ja -hoito
- Bakteereja ja sieniä sitova haavasidos kuiville ja vähän erittäville haavoille
- Sopii myös kanyylien, piikkien ja dreenien suojaksi
- Vedenkestävä
- Kalvo läpäisee vesihöyryä ja kaasua

Koot:

5 x 7,2 cm	(98140, G103084)
8 x 10 cm	(98141, G103085)
10 x 15 cm	(98142, G109477)
10 x 20cm	(98143, G109478)
10 x 25cm	(98144, G109479)
10 x 30cm	(98145, G109480)
10 x 35cm	(98146, G103086)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact Foam Gentle Border ® (Verman)

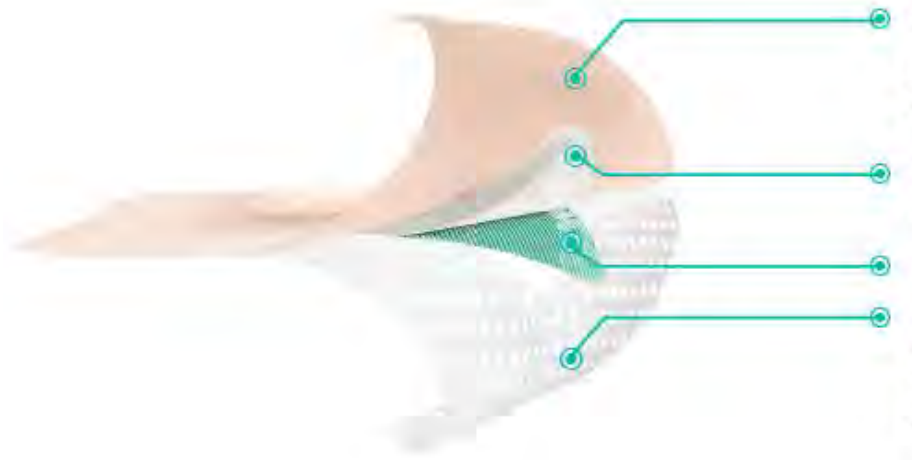

Tuotekuvaus

- Sorbact®-teknologiaan perustuva bakteereja ja sieniä sitova haavasidos
- Silikonikiinnitteinen
- Suihkunkestävä ja puoliläpäisevä kalvo
- Infektiota ehkäisevä ja hoitava steriili vaahtosidos

Käyttö

- vähän ja kohtalaisesti erittäville haavoille
- ei voi leikata
- leikkaushaavat, traumahaavat, painehaavat, diabeettiset haavat sekä jalka- ja säärihaavat.

Koot:

7,5 x 7,5 cm	(98531, G105129)
10 x 10 cm	(98532, G110514)
15 x 15 cm	(98553, G111535)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact Foam® (Verman)



Tuotekuvaus

- Sorbact®-teknologiaan perustuva bakteereja ja sieniä sitova vaahtosidos vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille
- infektiota ehkäisevä ja hoitava

Käyttö

- vähän ja kohtalaisesti erittäville haavoille
- Kiinnittymätön, vaatii kiinnityssidoksen
- Kosteutta haihduttava, puoliläpäisevä taustakalvo => käytettäessä kiinnitysteippejä, kiinnitys sidoksen reunoilta
- Voi leikata
- Asetetaan vihreä pinta suoraan kontaktiin haavaa vasten
- Soveltuu sidokseksi eripuhdistusasteen haavoille ja infektoituneille haavoille

Koot:

10 x 10 cm

(98310, G110514)

10 x 20 cm

(98320, G110515)

Haavasidos, hydrofobinen Sorbact® Superabsorbent (Verman)



- superimevä, runsaasti erittäville haavoille
- infektiota ehkäisevä ja hoitava
 - hydrofiberinen pinta sitoo bakteerit, imevä pinta sitoo haavaeritteen
- kiinnittymätön
- ei voi leikata
- sidosta voi pehmittää/möyhentää kevyesti puristelemalla ennen paikalleen asettamista, jolloin se mukautuu paremmin esimerkiksi säärelle

Koot:

10 x 10 cm	(98501, G110514)
10 x 20 cm	(98502, G110515)
20 x 30 cm	(98504, G111537-1)

Haavalevy, vaahtosidos, ei kiinnittyvä, steriili, puhdistava PolyWic® (Steripolar Oy)



- Interaktiivinen haavasidos, sisältää haavan puhdistumista tehostavia ainesosia
- Pehmittää haavakatetta
- Imukykyinen
- Tehostaa haavan puhdistumista (ei kuitenkaan korvaa mekaanista puhdistusta)
- Haavaan tarttumaton
- Ei taustakalvoa
- Vaatii päälle imukykyisen peittosidoksen
- Voi leikata


Käyttö:

- Pinnallisille ja syville haavoille
- Syvemmille haavoille leikataan haavaa hieman pienemmäksi ja asetetaan kontaktiin haavapohjan kanssa

Koot:

8 x 8 cm	(5733, G100352)
8 x 30 cm	(5712, G105103)

Vaahtosidos, muotoiltu, ei kiinnittyvä, steriili, puhdistava Polymem ® sormi-/varvassidos (Steripolar Oy)

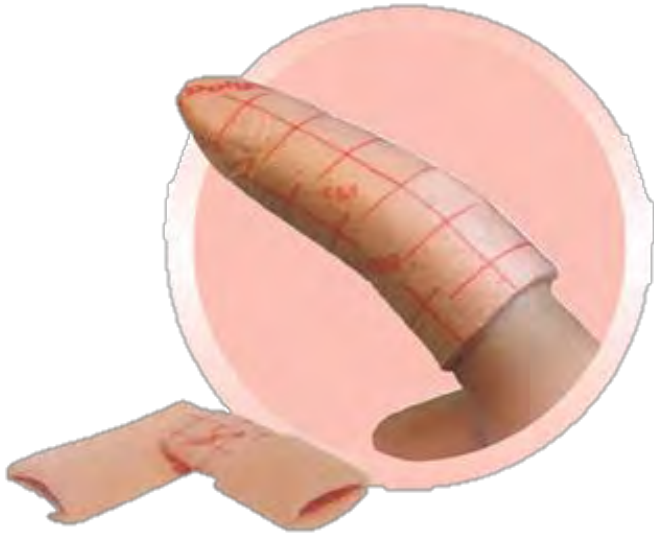

- Interaktiivinen haavasidos, sisältää haavan puhdistumista tehostavia ainesosia
- Pehmittää haavakatetta
- Puoliläpäisevä taustakalvo
- Saa leikata
- Vähän tai kohtalaisen vähän erittäville haavoille
- Voi käyttää ompeleiden ja hakasten kanssa

Koot:

Koko 1	(4401, G111316)
Koko 2	(4402, G111317)
Koko 3	(4403, G111318)
Koko 4	(4404, G111319)
Koko 5	(4405PM, G111320)

X-Haavalevy, ohut, kiinnittyvä, steriili Mepilex Transfer ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- polyuretaanivaahtosidos
- kiinnitysaineena silikonit, ei tartu haavaan
- imee eritteet kapillaarisesti
- väriltään valkoinen

Käyttö:

- ihon suojaaminen
- runsaasti erittäville haavoille siirtävänä sidoksena
- voi leikata
- runsaasti erittäville haavoille Transferin päälle asetetaan imevä sidos

Koot:

7,5x8,5 cm	(294600, G105211)
10x12 cm	(294700, G105212)
15x20 cm	(294800, G111232)
20x50 cm	(294502, G110391)

Vaahtosidos, ohut, kevyesti kiinnittyvä, setriili Mepilex Lite ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- ohut ja mukautuva vaahtosidos
- kiinnitysaineena silikoni
- päällä hengittävä suojakalvo

Käyttö:

- vähän tai ei lainkaan erittäville haavoille
- voidaan käyttää hauraan ihon suojana
- voi käyttää painesidoksen alla
- vaihto tarvittaessa
- sidos laitetaan haavareunojen yli
- voi leikata

Koot:

6 x 8,5 cm	(284000, G105210)
10 x 10 cm	(284100, G105212)
15 x 15 cm	(284300, G111231-1)
20 x 50 cm	(284500, G110391-2)

Haavasidos, polyuretaani ei kiinnittyvä Biatain ® (OneMed)



- Vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille
- Ulkopinta läpäisevä ja vedenpitävä
- Voi leikata
- käytetään ensisijaisena tai toissijaisena sidoksena
- Pinnalla puoliläpäisevä polyuretaanikalvo
- Tarvitsee erillisen kiinnityksen => Ei saa peittää käytettäessä kiinnitykseen haavakalvoa => kiinnitys reunoilta

Koot:

10 x 10cm	(CPL334100, G101504)
10 x 20 cm	(CPL334120, G101505)
20 x 20 cm	(CPL334160, G111224)

Haavasidos, polyuretaani, ei kiinnittyvä Aquacel Foam® (Convatec Oy)



- Vaahtosidos, jossa haavaa vasten hydrofiber-tekniikan omaava geelityvä kuitukerros
- Sidoksen päällimmäinen kerros puoliläpäisevä, kosteutta haihduttava kalvo

Käyttö

- Pinnalliset vähän tai kohtalaisesti erittävät krooniset ja akuutit haavat, säärihaavat, ihonottokohdat
- Voidaan käyttää yhdessä Aquacel Extran ja Aquacel Extra Ag:n kanssa, joko täyttämään syvempää haavaa tai imutehoa lisäämään
- Kiinnittymätön => vaatii kiinnityksen esimerkiksi sideharsolla, putkisidoksella tai kiinnitys reunoilta esim. haavakalvolla

Muuta huomioitavaa:

- Voidaan käyttää myös ihonottokohdalla, jolloin sidos asetetaan jo primäärästi leikkaussalissa ihonottokohdalle.
- Sidos irtoaa haavapohjasta haavan parantuessa ja epitelisoituessa eikä sitä tällöin vaihdeta välillä.

Koot:

5 x 5cm	(420631, G101504)
10 x 20cm	(421156, G101505)
20 x 20cm	(420636, G111224)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili Mepilex XT® (Mölnlycke Health Care Oy)



- imukykyinen vaahtotyyny
- Pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- puolihengittävä
- Ei kestä suihkutusta

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- voi leikata
- Kevyesti kiinnittyvä , vaatii tarvittaessa kiinnityksen

Koot:

5 x 5 cm	(211015, G112739-1)
10 x 10 cm	(211100, G101542-1)
10 x 20 cm	(211200, G105174-2)
15 x 15 cm	(211300, G101542-2)
20 x 20 cm	(211400, G108784-4)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili

Mepilex® (Mölnlycke Health Care Oy)



- imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikonikiinnitysaineena
- Puolihengittävä
- Ei kestä suihkutusta

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- voi leikata

Koot:

10 x 20 cm	(294200, G100354-1)
15 x 15 cm	(294300, G101544-2)
20 x 20 cm	(294400, G108784-5)
20 x 50 cm	(294500, G112741-1)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili Mepilex Heel ® (Mölnlycke Health Care Oy)



SafetaC

- imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikonikiinnitysaineena
- puolihengittävä
- vedenkestävä pinta (ei suihkun kestävä)
- suunniteltu etenkin kantapään alueelle

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat, painehaavan ennaltaehkäisyyn, kipsin alle
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- voi leikata


Koot:

13 x 20 cm

(288100, G105086-1)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili

Mepilex Border Flex Lite® (Mölnlycke Health Care Oy)

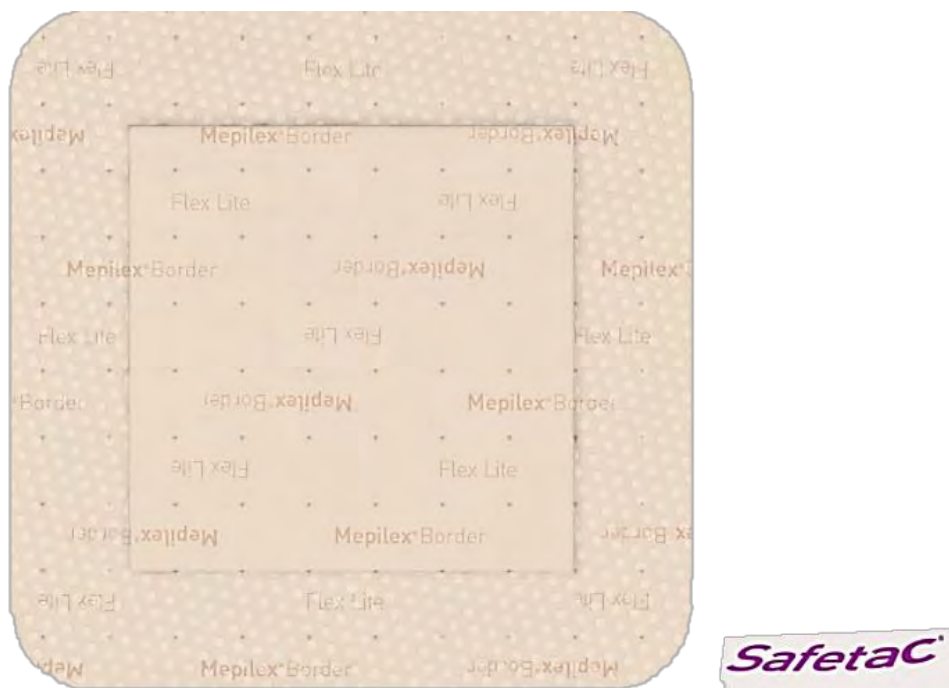

- monikerroksinen, kevyesti imevä vaahtotyyny
- 360 astetta joustava sidos
- pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- suihkun kestävä, kosteuden- ja höyryn läpäisevä
- useita kokoja ja malleja

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, sormien- ja varpaiden haavat
- vähän erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- ei voi leikata

Koot:

4 x 5 cm	(581011, G105208)
5 x 12,5 cm	(581100, G108913-2)
7,5 x 7,5 cm	(581200, G105209)
10 x 10 cm	(581300, G108914)
15 x 15 cm	(581500, G108915-2)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili Mepilex Border Flex ® (Mölnlycke Health Care Oy)



SafetaC

- monikerroksinen, imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- 360 asteen jousto
- suihkun kestävä, kosteuden- ja höyryn läpäisevä
- useita kokoja ja malleja

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- ei voi leikata

Koot:

7,5 x 7,5 cm	(595200, G105203)
10 x 10 cm	(595300, G105204)
15 x 20 cm	(595600, G105207)
10 x 20 cm	(595800, G112735-1)
10 x 25 cm	(595850, G105205-2)
10 x 30 cm	(595900, G105082)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili

Mepilex Border Flex Oval ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- monikerroksinen, imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- 360 asteen jousto
- suihkun kestävä, kosteuden- ja höyryn läpäisevä
- useita kokoja ja malleja
- toimii myös kompression alla

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa
- sopii esim. kynärpäälle tai polvelle
- ei voi leikata
- toimii myös kompression alla

Koot:

7,8 x 10 cm	(583500, G112736-1)
13 x 16 cm	(583300, G112737-1)
15 x 19 cm	(583400, G112738-1)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili Mepilex Border Sacrum ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- monikerroksinen, imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- suihkun kestävä, kosteuden- ja höyryn läpäisevä
- ei voi leikata
- tarkoitettu sacrumin painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon


Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa

Koot:

15 x 15 cm	(285500, G104944)
16 x 20 cm	(282050, G104944-2)
22 x 25 cm	(282450, G104944-1)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili Mepilex Border Heel ® (Mölnlycke Health Care Oy)

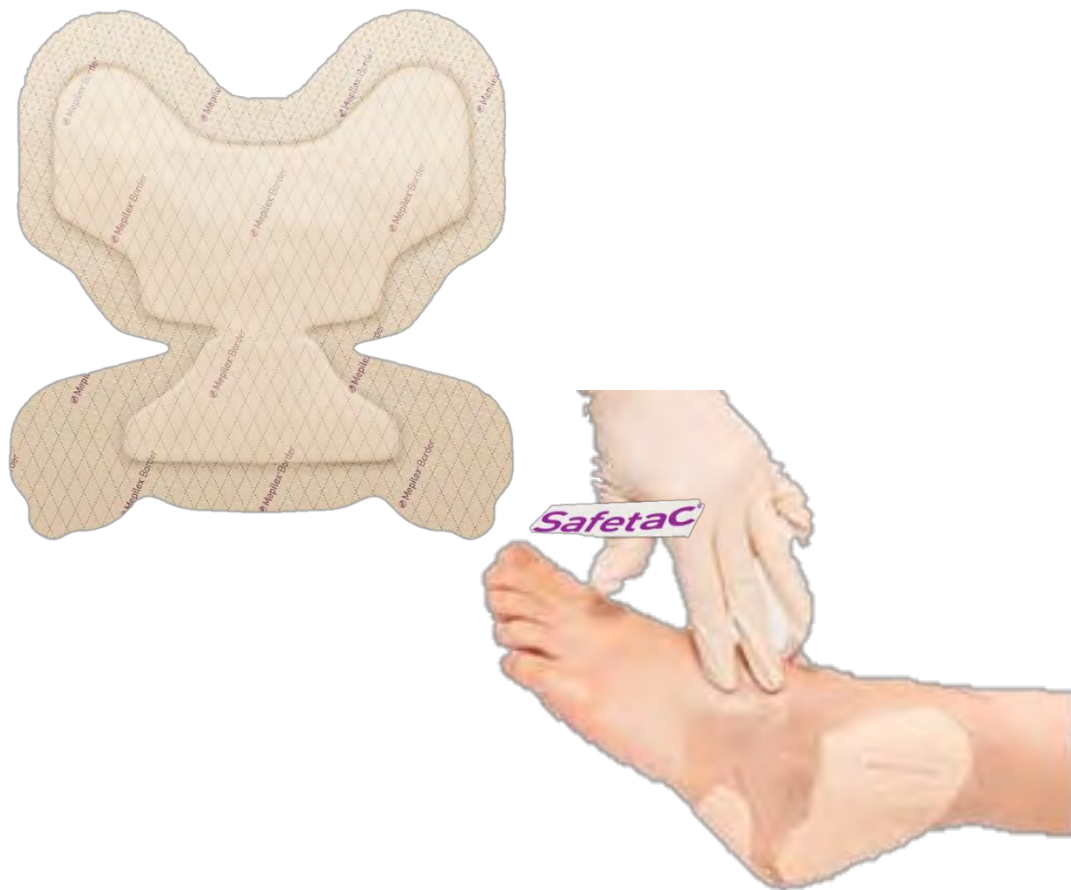

- monikerroksinen, imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikoni kiinnitysaineena
- suihkun kestävä, kosteuden- ja höyryn läpäisevä
- ei voi leikata
- tarkoitettu kantapään painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Käyttö:

- krooniset haavat, painehaavat, traumaattiset haavat
- kohtalaisesti erittäville haavoille
- vaihto tarvittaessa

Koot:

22 x 23 cm

(282750, G109928-3)

Haavalevy, vaahtosidos, steriili

Mepilex Border Post-Op ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- monikerroksinen, imukykyinen vaahtotyyny
- pehmeä silikonikiinnitysaineena
- 360 asteen jousto
- suihkun kestävä
- ei voi leikata

Käyttö:

- leikkaushaavat, viiltahaavat, hiertymät
- Erityisesti suunniteltu postoperatiiviseen käyttöön, veren imeyttämiseen
- vaihto viimeistään 7 vrk kuluttua

Koot:

10 x 15 cm	(496300, G110057)
10 x 20 cm	(496400, G110058)
10 x 25 cm	(496450, G110059)
10 x 30 cm	(496600, G110060)
10 x 35 cm	(496650, G110061)

Haavageeli, hunaja, steriili Medihoney Wound Gel (Steripolar Oy)



- Sisältää 80% prosentista (*Leptospermum scoparium*) manukahunajaa sekä yhdistelmän luonnollisia vahoja ja öljyjä
- Korkean viskositeetin omaava geeli on helppo levittää pinnalliselle haavalle
- luo haavaan osmoottisen vaikutuksen
- nopeuttaa nekroottisen kudoksen hajoamista
- vähentää hajun muodostumista
- Antibakteerinen, tulehdusta ehkäisevä vaikutus

Käyttöaiheet:

- akuutit ja krooniset haavat
- palovammat
- säarihaavat
- painehaavat
- ihonotto kohta
- Ihonsiirtokohta

Laittaminen:

- Suojaa haavaympäristö
- Levitä suoraan haavalle (noin 3 mm kerros) tai kyllästä sideharsotaitos hunajalla.
- Tarkista, että hunaja peittää koko haavan.
- Suojaa hunajasidos haavaan tarttumattomalla voimakkaasti imevällä sidoksella.
- Hunajasidos tulee vaihtaa 7 vrk:n välein riippuen haavaerityksen määrästä.
- Pseudomonas positiivisissa haavoissa sidoksen vaihtoväli on 1 vrk.

Huomioitavaa:

Haavaeritys lisääntyy aluksi käytön aikana. Tämä johtuu hunajan osmoosivaikutuksesta, joka poistaa turvotusta ja nestettä haavapohjan kudoksesta. Tästä syystä haavaympäristön ihon suojaus todella tärkeää

Peittosidokseksi valitaan runsaasti imevä haavanpeittosidos

Koot:

20g (395, G110500-3)

Haavageeli, hunaja 100% , steriili

Medihoney Medical Honey (Steripolar Oy)



- 100-prosenttista uusiseelantilaista *Leptospermum scoparium* manukahunajaa
- Antibakteerinen
- Luo haavaan osmoottisen vaikutuksen
- Nopeuttaa nekroottisen kudoksen hajoamista
- Vähentää hajun muodostumista
- Tulehdusta ehkäisevä vaikutus
- Tehoo vastustuskykyisiin kantoihin (MRSA,VRE), sieniin ja itiöihin
- Soveltuu myös diabeetikoille ja lapsille

Huomioitavaa:

Haavaeritys lisääntyy aluksi käytön aikana. Tämä johtuu hunajan osmoosivaikutuksesta, joka poistaa turvotusta ja nestettä haavapohjan kudoksesta. Tästä syystä haavaympäristön ihon suojaus todella tärkeää

Peittosidokseksi valitaan runsaasti imevä haavanpeittosidos

Käyttöaiheet:

- Akuutit ja krooniset haavat
- Syvät haavat
- Onkalohaavat
- Nekroottiset haavat
- Infektoituneet haavat
- Palovammat

Säilyvyys:

- Avattuna 4 kk

Koot:

20g (398, G110500)

Haavan hoitoaineet

Askina Calgitrol Paste ® (B. Braun Medical Oy)



Tuotekuvaus

- Ionista hopeaa sisältävä alginaattipasta
- Antimikrobinen teho
- Muotoutuu haavan pohjaan
- Ei värjää ihoa
- Säilyy avattuna 7 vuorokautta

Käyttö

- Ravistettava voimakkaasti ennen käyttöä, rakenne paksuuntuu
- Infektoituneet haavat
- Painehaavat
- Verisuoniperäiset haavat
- 2 asteen palovammat
- Ihonottokohdat
- Traumahaavat
- Onkalohaavat, haavataskut
- Soveltuu käytettäväksi luu- ja jännekudoksen päällä
- Levitetään paksuna kerroksena haavalle
- Poistetaan huuhtelemalla
- Vaatii peittosidoksen, joka valitaan erityksen mukaan

Koot:

15 g (6241505, G109914)

Haavasidos, geeliytyvä, hopea, ei kiinnittyvä, steriili Aquacel Ag + Extra ® (ConvaTec Oy)



- Hopealla kyllästetty hydrofibersidos
- Hajottaa biofilmiä ja ennaltaehkäisee biofilmin muodostumista
- Tuhoaa infektiota aiheuttavia bakteereita
- Mikromuotoutuu haavan pohjaan
- Imee ja lukitsee itseensä haavaeritteen ja bakteerit
- Kuivana voi leikata
- Ylläpitää kosteustasapainoa
- Avelle-alipaineimulaitteen yhteydessä haavan täytesidoksena haavan ja alipaine-sidoksen väliin
- Vaatii imevän peittosidoksen

Käyttö:

- Infektoituneille haavoille
- Kuivana runsaasti erittäville haavoille
- Kostutettuna kuiville haavoille, janteen ja luun päälle
- sopii myös ontelohaavoihin
- imutehoa saadaan lisäämällä kerroksia

Koot:

1 x 45cm	(CV-413570, G109025)
2 x 45 cm	(CV-413571, G109026)
10 x 10 cm	(413567, G109270)
15 x15 cm	(413568, G112728)

Haavasidos, hopea, steriili

Aquacel Ag Foam ® (ConvaTec Oy)



Tuoteseloste ja ominaisuudet:

- Vedenpitävä, kosteutta haihduttava, polyuretaanikalvo ja pehmeä, muotoutuva polyuretaanivaahokerros
- Haavakontaktipintana geelityvä hydrofiber- kuitukangas, jossa on 1,2 % hopeaioneja
- silikoninen kiinnitysreuna kiinnittyvässä tuotteessa
- Sidoksessa oleva hopea tappaa haavabakteereja
- Biofilmiä hajottava
- Imee haavaeritettä

Käyttö

- Pinnallisille ja kohtalaisesti erittäville infektoituneille haavoille
- Kriittisesti kolonisoituneille haavoille, joissa kohonnut infektoitumisen riski
- Kroonisten ja akuuttien haavojen hoitoon
- Ensisijaisena tai toissijaisena sidoksena yhdessä Aquacelin kanssa
- Syvemmillä haavoilla voidaan käyttää yhdessä Aquacel Ag Extra hydrofiber-sidoksen kanssa

Koot:

10 x 10 cm	(420681, G101492)
17,5 x 17,5 cm	(420628, G101497)

Haavasidos, hopea, steriili, kiinnittymätön Aquacel Ag Foam ® (ConvaTec Oy)



Tuoteseloste ja ominaisuudet:

- Vedenpitävä, kosteutta haihduttava, polyuretaanikalvo ja pehmeä, muotoutuva polyuretaanivaahokerros
- Haavakontaktipintana geeliiytyvä hydrofiber-kuitukangas, jossa on 1,2 % hopeaioneja
- Sidoksessa oleva hopea tappaa haavabakteereja
- Biofilmiä hajottava
- Imee haavaeritettä

Käyttö

- Pinnallisille ja kohtalaisesti erittäville infektoituneille haavoille
- Kriittisesti kolonisoituneille haavoille, joissa kohonnut infektoitumisen riski
- Kroonisten ja akuuttien haavojen hoitoon
- Ensisijaisena tai toissijaisena sidoksena yhdessä Aquacelin kanssa
- Syvemmillä haavoilla voidaan käyttää yhdessä Aquacel Ag Extra hydrofiber- sidoksen kanssa
- Ihonottokohdille

Haavasidos, hopea, polyuretaani, ei kiinnittyvä Biatain Ag® (OneMed Oy)



Tuoteseloste JA OMINAISUUDET:

- 3-D-polymeerivaaho, ionisoitu hopea
- imukykyinen ja pehmeä haavalevy
- Ionisoitu hopea ei kehitä bakteeriresistenssiä
- hopea vapautuu haavalle haavaeritteen imeytyessä sidokseen
- säilyttää haavalla kostean paranemisympäristön

Käyttö

- Vähän tai kohtalaisesti erittävät kriittisesti kolonisoituneet tai infektoituneet haavat
- Diabeettiset haavat
- Krooniset säärihaavat
- Muut hitaasti paranevat krooniset haavat

Haavasidos, joustava verkko, hopea, ei kiinnittyvä, steriili

Acticoat Flex3 ® (OneMed Oy)



Koot:

10 x 10 cm	(66800398, G109530-4)
10 x 20 cm	(66800409, G109530-3)
20 x 20 cm	(66801293, G109530-5)

- Polyesteristä valmistettu, pehmeä ja mukautuva sidos, jossa on Nanokidehopea-pinnoite
- Haavalle lähes tarttumaton
- Suojaa haavaa mikrobeilta ja tappaa bakteereja
- Vaikutus alkaa 30 min kuluttua sidoksen asettamisesta haavalle
- Antimikrobinen vaikutus kestää 3 vrk
- Vaatii peittosidoksen
- Voi aiheuttaa hoidon alussa tilapäistä kipua

Käyttö

- Infektoituneet haavat
- Pinnalliset ja syvät haavat
- Erilaiset krooniset haavat
- Palovammat
- Kostutetaan upottamalla veteen tai käärimällä hetkeksi veteen kostutetun harsotaitoksen sisälle tai vaihtoehtoisesti käytetään hydrogeelin kanssa yhdessä
- voi leikata
- kontaktipintana haavalla alipaineimuhoidon kanssa
- sidoksen vaihto 3 vrk välein
- Ei sovellu käytettäväksi öljyjen tai rasvojen kanssa
- Voi aiheuttaa haavaympäristön ihon tilapäistä värjäytymistä

Huomioitavaa !

- Tulee poistaa haavalta ennen sädehoidon antamista, hoitokerran jälkeen haavalle uusi sidos
- Ei sovellu käytettäväksi Magneettikuvausten (MRI) yhteydessä
- Ei saa käyttää NaCl-liuosta yhdessä Acticoat Flex-sidoksen kanssa

Haavasidos, hopea ei kiinnittyvä PolyWic Silver[®] (Steripolar Oy)



- Pienhiukkainen hopea tappaa haavan epäpuhtaudet ja mikrobit, eikä se vapaudu potilaaseen
- Sisältää F68 -pinta-aktiivisen haavaa puhdistavan ainesosan
- Sisältää glyseriiniä, joka pehmittää nekroottista kudosta ja estää sidoksen tarttumista haavaan
- Tehokas imukyky
- Ei puoliläpäisevää peittokalvoa => Vaatii imevän peittosidoksen
- Sidoksen polymeerinen matriisi poistaa soluväleistä ylimääräistä nestettä, vähentäen haava-alueen turvotusta
- Huomioitava : Hoidon alussa lisää haavaeritystä=> haavaympäristön suojaus ja riittävän imukykyinen peittosidos


Käyttö:

- Infektoituneille pinnallisille ja syville haavoille
- Käytettäessä syvemmillä haavalla, leikataan haavaa pienemmäksi, koska laajenee imiessään haavaeritettä
- Sopii myös haavoille, joissa nivel tai luupinta näkyvissä
- Vaatii imukykyisen peittosidoksen
- Voidaan laittaa useampia kerroksia päällekkäin
- Voi leikata

Koot:

2,5cm x 7,6 cm	(1331, G108472-5)
8 x 8 cm	(1333, G101494-1)
20 x 20 cm	(1788, G112218-1)

Haavasidos, hopea ei kiinnittyvä PolyMem Silver® (Steripolar Oy)

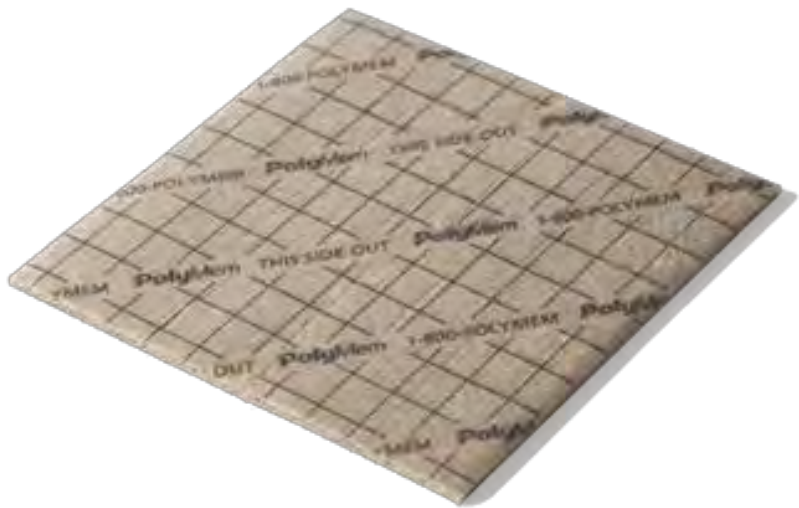

- Sisältää pienhiukkasista hopeaa
- Ei luovuta hopeapartikkeleita haavalle
- Antimikrobinen, bakteereja tappava
- Interaktiivinen haavasidos, sisältää haavan puhdistumista tehostavia ainesosia
- Pehmittää haavakatetta
- Imukykyinen
- Tehostaa haavan puhdistumista (ei kuitenkaan korvaa mekaanista puhdistusta)
- Haavaan tarttumaton
- Sidoksessa puoliläpäisevä taustakalvo

Käyttö:

- Vähän tai kohtalaisen vähän erittäville infektoituneille haavoille
- Säarihaavat, traumahaavat, kivuliaat haavat, epätyypilliset haavat
- Saa leikata
- Vaatii kiinnityssidoksen
- Ei saa peittää kiinnitettäessä haavakalvolla, käytettäessä haavakalvoa kiinnitykseen, kiinnitetään sidos vain sidoksen reunoilta

Koot:

10 x 10 cm

(1044, G105102)

Haavalevy, hopea

Mepilex Ag ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- polyuretaanivaahtosidos, joka sisältää hopeaioneja
- pinnassa puoliläpäisevä kalvo
- imee kohtalaisesti haavaeritettä
- voi leikata

Käyttö:

- infektoituneisiin haavoihin
- sidoksen vaihto tarvittaessa, max. 7 vrk
- hoitoaika max. 2 viikkoa
- sidos laitetaan haavan reunojen yli

Huomioitava:


- kiinnityksessä ei saa käyttää haavakalvoa
-> tulee hengittämätön sidos

Koot:

10 x 10 cm	(287110, G111230-2)
10 x 20 cm	(287210, G101494)
15 x 15 cm	(287310, G111512-2)
20 x 20 cm	(287410, G111221-2)
20 x 50 cm	(287510, G112742-1)

Haavalevy, hopea

Mepilex Transfer Ag[®] (Mölnlycke)

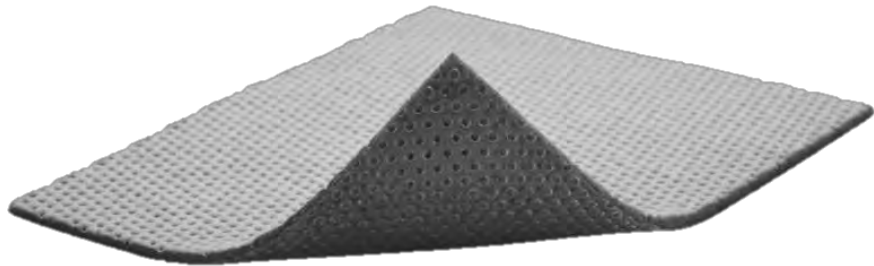

- Haavaeritettä iholta siirtävä vaahtosidos erittävien palovammojen ja haavojen hoitoon
- Sisältää hopeasulfaattia

Käyttö:

- Voidaan leikata
- Haavakontaktisidos
- Tarvitsee imevän sidoksen päälle

Koot:

7,5x8,5 cm	(394000, G111602-2)
10x12,5 cm	(394100, G111973-2)
15x20 cm	(394800, G111974-2)
20x50 cm	(394500, G111975-2)

Vaahtosidos, hopea, muotoiltu, ei kiinnittyvä, steriili, puhdistava Polymem Silver ®, sormi- ja varvassidos (Steripolar Oy)



- Sisältää pienhiukkasista hopeaa
- Ei luovuta hopeapartikkeleita haavalle
- Antimikrobinen, bakteereja tappava
- Interaktiivinen haavasidos, sisältää haavan puhdistumista tehostavia ainesosia
- Pehmittää haavakatetta
- Imukykyinen
- Tehostaa haavan puhdistumista (ei kuitenkaan korvaa mekaanista puhdistusta)
- Haavaan tarttumaton
- Sidoksessa puoliläpäisevä taustakalvo

Käyttö:

- infektoituneille sormien /varpaiden haavoille
- vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille
- oikea koko löytyy, kun mittaat sormen/varpaan paksuimman ympärysmittan
- Saa leikata

Koot:

Koko1	(1401, G111321)
Koko2	(1402, G111322)
Koko3	(1403, G111323)
Koko4	(1404, G111324)
Koko5	(1405, G111325)

Haavatyyny, superimevä, steriloimaton DryMax® (OneMed Oy)



Tuotekuvaus:

- Imee haavaeritettä tehokkaasti ja nopeasti ja sitoo sen geelimäiseen muotoon haavatyynyn sisään
- Geelitynyt neste pysyy sidoksen sisällä myös puristuksessa, joten se sopii käytettäväksi kompressiohoidossa
- Estää hajua
- Pintakuiva

Käyttö:

- Runsaasti erittävien haavojen kuten säarihaavojen, painehaavojen ja diabeetikon jalkahaavan hoitoon
- Voidaan käyttää ensisijaisena imevänä peittosidoksena tai imutehoa lisäävänä toissijaissidoksena
- Vaatii kiinnityssidoksen
- Ei saa leikata

Koot:

10 x 10cm	(2001110, G112754-1)
10 x 22 cm	(2002110 G112751-1)
20 x 30 cm	(2005110, G112753-1)
20 x 22 cm	(2004110, G112752-1)

Haavatyyny, ei kiinnittyvä, steriili Imevä sidos evercare® (OneMed Oy)




- Imevä sidos kohtalaisesti erittäville haavoille
- kiinnittymätön
- valkoinen puoli haavaa vasten
- pintakuiva
- ei tartu haavaan
- ei voi leikata

Koot:

10 x 10cm	(TML4781-01, G104221)
10 x 20cm	(TML4782-01, G104209)
15 x 25cm	(TML4785, G104663)
20 x 30cm	(TML4788-01, G104207)
20 x 40cm	(TML4789, G108786-2)

Haavatyyny, superimevä, ei kiinnittyvä, steriili Mextra® Superabsorbent (Mölnlycke Health Care)

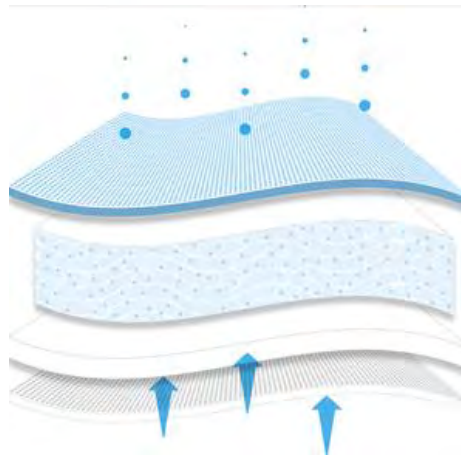

- runsaasti erittäville haavoille
- erittäin hyvä imukyky, -eritteen pidätyskyky ja mukautuva sidos
- hyvän imukykyisyytensä ansiosta haavan paraneminen edistyy ja haavassa oleva extrasellulaarimatrix-verkko pysyy eheämpänä
- nesteitä hylkivä tausta
- ei voi leikata

Koot:

10 x 10cm	(610700, G109064)
10 x 20cm	(610720, G109065)
15 x 20cm	(610730, G105197)
20 x 25cm	(610740, G104946)
20 x 30cm	(610750, G111515-1)
20 x 40cm	(610760, G111225-1)

Haavalevy, Aktiivihiilliside

Askina Carbosorb[®] (B. Braun Medical Oy)



- Steriili haavasidos
- Imee bakteereja ja hajuja
- kohtalainen imukyky
- Runsaasti erittävillä, haisevilla haavoilla, voidaan käyttää toisen imevän peittosidoksen alla sitomaan hajua
- tarvitsee kiinnityssidoksen
- voidaan leikata

Käyttö:

- asetetaan haavalle valkea puoli haavaa vasten
- Valitaan sidoskoko niin, että sidos ylittää 2-3 cm haavan reunojen yli
- laskimo- ja valtimoperäiset säärihaavat, painehaavat, sienimuotoiset haavat (syöpä), infektoituneet ja/tai pahanhajuiset leikkaus- tai traumahaavat


Koot:

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

(9025014, G100347)

Haavatyyny, kiinnittyvä, kalvo, steriili Kliniderm film ® (Mediq Suomi Oy)

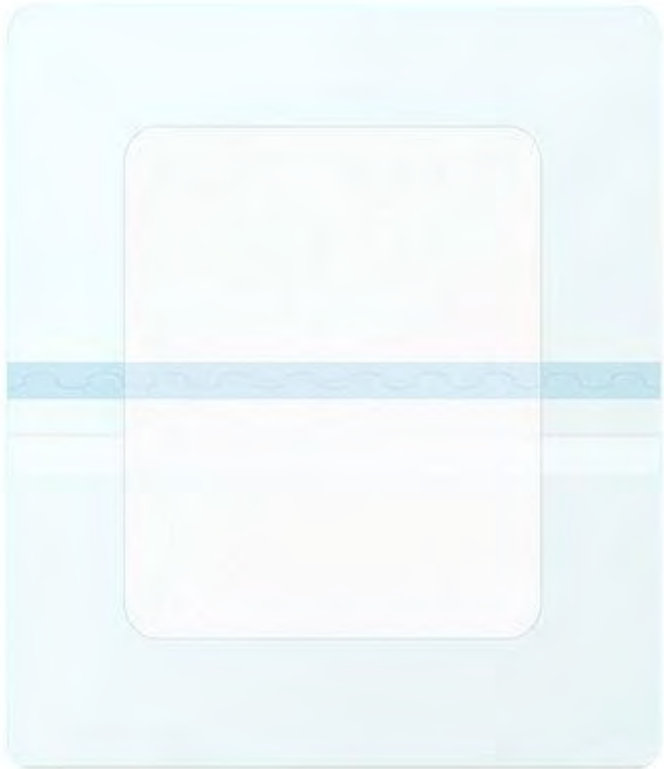

- polyuretaanikalvo + haavatyyny
- vähän tai ei ollenkaan erittäville haavoille
- suihkun kestävä
- pinnallisille ihorikoille
- suojaamaan hankaukselta

Koot:

5 x 7cm	(40514860, G105101)
10 x 10cm	(40514861, G109513)
10 x 15cm	(40514863, G109514)
10 x 20cm	(40514864, G100367)

Haavatyyny, kiinnittyvä, kalvo, steriili evecare® (OneMedOy)



- Polyuretaanikalvo + haavatyyny
- Liimakiinnitteinen, hellävarainen liima-aine
- Steriili, yksittäispakattu sidos
- Kirurgisille leikkaushaavoille
- Vähän tai kohtalaisen vähän erittäville haavoille
- Suihkun kestävä
- Hengittävä

Koot:

10 x 25cm

(TML4765, G105100)

10 x 35cm

(TML4769, G105099)

Haavatyyny, kiinnittyvä, kuitukangas, steriili

Mepore® (OneMed Oy)



Tuoteseloste ja ominaisuudet:

- Polyakrylaattiliima, viskoosi, polyesteri, polyetylenei
- Ei sisällä luonnonhartsia eikä luonnonkumia
- Vesipohjainen akryylliliima
- Pehmeä ja elastinen kuitukangas
- Ei veden pitävä
- Sidosta ei saa venyttää asetettaessa haavalle

Käyttö:

- Pienille, vähän erittäville haavoille
- Leikkaushaavoille
- Ihoviillot ja ihon pinnalliset naarmut
- Toissijaisena peittosidoksena esim. Primäärästi tuoreelle leikkaushaavalle haavateipin päälle
- Hengittävä peittosidos

Käytön vasta-aiheet:

- Ohut ja helposti vaurioituva iho
- Yliherkkyys tai allergia sidoksen sisältämille aineille.

Koot:

6 x 7 cm	(MLN670870, G104591)
9 x 10 cm	(MLN672100, G104686)
8 x 15 cm	(MLN672200, G104676)
9 x 20 cm	(MLN671100, G104776)
9 x 30 cm	(MLN671300, G108792)

Kiinnitysside, taustapaperi, rulla Mefix ® kiinnitysside



Tuotekuvaus

- pehmeä ja elastinen kuitukangasteippi
- muotoutuva
- huokoinen rakenne päästää vesihöyryn läpi
- ei ole vesitiivis
- voi leikata halutun muotoiseksi
- ei sisällä lateksia
- Materiaali muodostaa esteen veren ja haavaeritteen läpivuotamiselle

Käyttö:

- sidosten kiinnittämiseen
- asetettaessa ei saa venyttää

Koot:

5cm x 10 m	(310500, G104616)
10cm x 10 m	(311000, G104617)
15cm x 10 m	(311500, G104618)

Haavakalvo, steriloimaton Opsite Flexfix ® (Smith & Nephew Oy)



Tuotekuvaus

- polyuretaanikalvo
- Vesitiivis, mahdollistaa suihkussa käynnin
- Läpinäkyvä, joustava Kosteushöyryä läpäisevä
- Ei sisällä luonnonkumia tai hartsia
- Akryyliiliimakiinnitteinen
- voi leikata

Käyttö

- Ensisijaisen ja toissijaisen sidoksen kiinnittämiseen

Älä käytä:

- Avohaavoille

Noudata varavaisuutta

- erittäin herkkäihoisilla
- vanhusten hauraalla, ohentuneella iholla

Koot:

5 x 10 m (66000040, G104546)

10 x 10 m (66000041, G100342)

Haavakalvo, steriloimaton, silikonikiinnitteinen Opsite flexifix gentle ® (Smith&Nephew)



- Liima-allergisille ja herkälle iholle
- Läpinäkyvä
- Muotoutuva

Koot:

5 x 5 m	(66801197, G111226)
10 x 5 m	(66801196, G111227)
15 x 10 m	(66000375, G111307)

Haavakalvo, steriili, silikonipinta Mepitel film ® (Mölnlycke Health Care Oy)



- kalvosidos ihon suojaamiseen
- voi käyttää yksinään tai muiden tuotteiden kanssa
- suojaa haurasta ja herkkää ihoa
- suihkunkestävä

Koot:

6 x 7 cm	(296170, G105198)
10 x 12 cm	(296270, G105199)
10 x 25 cm	(296470, G105200)
15 x 20 cm	(296670, G105201)

Kiinnityssidos, kuitukangas, liimaton Fixomull skin sensitive ®



- Kuitukankainen kiinnityssidos herkkäihoisille, lapsille ja ikääntyneille
- silikoni kiinnitys, ei sisällä liimaa
- hyvin kiinnittyvä ja joustava, hengittävä
- poistaminen kivutonta
- voi leikata
- RTG läpäisevä
- Ei saa käyttää:
 - kanyyliin, letkujen ja dreerien kiinnitykseen ainoana kiinnitysmuotona
 - Keskoskaapissa olevalla keskoselle


Koot:

5 x 5 m

10 x 5 m

15 x 10 m

Haavalevy, Hydrokolloidi ohut DuoDerm ExtraThin® (ConvaTec Oy)

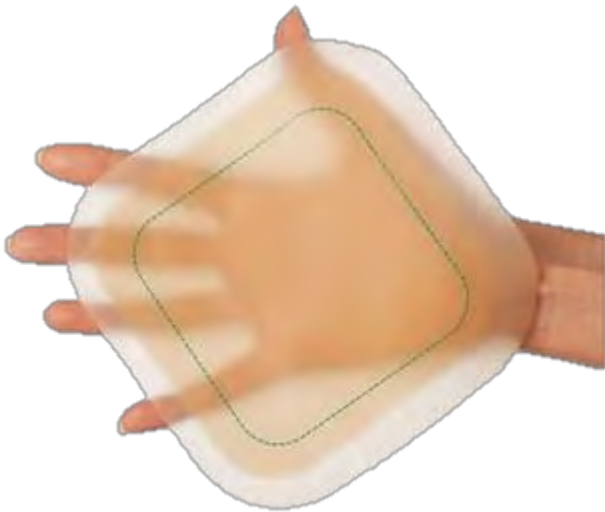

Tuotekuvaus

- Hydrokolloidisidos
- Ohut polyuretaanikalvopinta
- Vedenpitävä
- Muotoutuva, joustava

Käyttö:

- Vähän erittäville, pinnallisille haavoille esim. 1-2 asteen pinnalliset palovammat, hankaumat
- Ehkäisemään ihon hankaumia
- Suojaamaan ihoa esimerkiksi alipaineimusidosten alla
- Voidaan käyttää toissijaisena peittosidoksena vähän erittävillä haavoilla yhdessä hydrofiber-sidoksen kanssa
- Laitettaessa lämmitettävä käsin liiman aktivoimiseksi
- Ei saa venyttää
- Sidos laitetaan haavareunojen yli

Huomioitavaa

- Ei suositella käytettäväksi diabeetikoilla

Koot:

7,5x7,5cm	(187951, G112725-1)
10 x 10 cm	(401807, G101499-1)
15 x 15 cm	(187956, G101502-1)

Putkisivokset, pääside, valmissidos Carefix ® (Mediq Suomi Oy)



- kertakäyttöinen verkkosidos pään alueen haavasidosten kiinnitykseen, elastinen

Koot:

M	(1007577, G104688)
L	(1007562, G104687)

Kipsipehmuste, synteettinen

Soffban® (Oy essity Finland Ab)



- 100% polyesteria
- Pehmustukseen
- Päästää kosteutta pois pitäen samalla pehmustuskyvyn

Koot:

7,5 cm x 2,7 m	(71467-00001, G100389)
10 cm x 2,7 m	(71486-00005, G104231)
15 cm x 2,7 m	(71465-00001, G104232)
20 cm x 2,7m	(71466-00001, G104766)

Harsosidos: elastinen, kääreetön

Nobafix elast ® hasosiderulla (Mediq Suomi Oy)



- sidosten kiinnittämiseen
- elastinen

Koot:

6 cm x 4m

(1007846, G104773)

8 cm x 4m

(1007848, G104246)

10cm x4m

(1007846, G100394)

Harsosidos: joustamaton, kääreetön

Crimpelast ® (Mediq Suomi Oy)



- Kiristämätön
- Soveltuu hyvin valtimoverenkierron ongelmia sairastavalle
- Käsi- ja jalkakirurgisten sidoksiin

Koot:

6cm x 4m

8cm x 4m

Harsosidos, itsekiinnittyvä

Elastomull Haft ® (Mediq Suomi Oy/OneMed Oy)



- Lateksiton
- Itsekiinnittyvä kierreharsosidos
- Sopii haavasidosten ja kipsilastan kiinnittämiseen koko vartalon, erityisesti nivelten alueelle
- Huomioitava sidottaessa, ettei sidosta venytetä.
Sidos tulee herkästi liian tiukalle

Koot:

4cm x 4m
10cm x 4m

(45470-00000, G104759-3)
(SNW4547300000, G100392)

Harsosidos, itsekiinnittyvä

Klinifix cohesive ® (Mediq Suomi Oy)



Tuotekuvaus

- Lateksiton
- Itsekiinnittyvä kierreharsosidos
- Sopii haavasidosten ja kipsilastan kiinnittämiseen koko vartalon, erityisesti nivelten alueelle
- Huomioitava sidottaessa, ettei sidosta venytetä. Sidos tulee herkästi liian tiukalle

Koot:

8cmx4m

(132380, G104361)

Harsosidos, itsekiinnittyvä Mollelast® (Mediq Suomi Oy)



- Lateksiton
- Itsekiinnittyvä kierreharsosidos
- Sopii haavasidosten ja kipsilastan kiinnittämiseen, erityisesti nivelten alueelle
- Huomioitava sidottaessa, ettei sidosta venytetä. Sidos tulee herkästi liian tiukalle

Koot:

6 cm x 4m (1203679, G104180-4)

8 cm x 4m (1203680, G104361-1)

Tukiside, steriili

Tukisidos evercare® (OneMed)



- Tehdaspuhdas, kevyt tukiside
- joustavuus on noin 60 %.
- valmistettu puuvillasta ja polyamidista
- Hengittävä
- Haavasidoksen kiinnittämiseen, soveltuu nivelten ja pyöreiden kehonosien tukemiseen
- Tueksi esim. kipsin poistamisen jälkeen
- Kestää voiteita
- Yksittäispakattu sellofaaniin

Koot:

10cm x4m

12cm x4m

Putkisidokset, kipsinalussukka Stockinette Woodcast ® (Dassiet) ja Delta Dry Softliner ® (Oy Essity Finland Ab)

Kipsinalussukka, Stockinette Woodcast ®
(Dassiet)

- "Kertakäyttösukka"
- Polyesterineulosta
- Auttaa poistamaan kosteutta iholta

Koot:

5cmx22,8m	(X5022, G103026-4)
7,5cmx22,8m	(X7522, G103027-3)
10cmx22,8m	(X1022, G103028-4)


Kipsinalussukka, Delta Dry Softliner ® (Oy
Essity Finland Ab)

- "Kertakäyttösukka"
- Ei sisällä lateksia
- Vettä hylkivä

Koot:

5cmx2,4m	(SNW7344300, G103932-9)
7,5cmx2,4m	(SNW7344301, G103932-10)
10cmx2,4m	(SNW7344302, G103932-11)

Putkisiridokset, verkkosidos Surgifix Zerolates[®] (OneMed Oy)

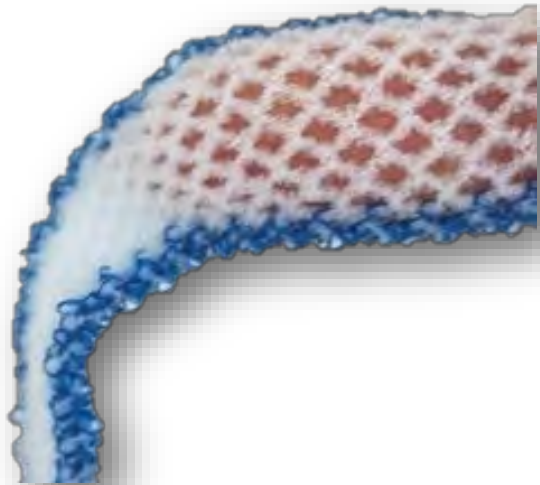

Elastinen, lateksiton verkkoside haavasidosten paikallaan pitoon ja kiinnitykseen.

Koot:

Koko A (1,2cmx25m)	(FRA00250001, G104247-3)
Koko B (2,3cmx25m)	(FRA00250002, G104249-3)
Koko C (3,4cmx25m)	(FRA00250003, G104250-1)
Koko D (4,4cmx25m)	(FRA00250004, G104251-3)
Koko E (5,6cmx25m)	(FRA00250005, G104252-3)
Koko F (7,2cmx25m)	(FRA00250006, G104253)
Koko G (8cmx25m)	(FRA00250007, G100845)
Koko H (10,1cmx25m)	(FRA00250008, G104551-3)
Koko I (13,5cmx25m)	(FRA00250009, G104767)

Putkisidos, kahteen suuntaan joustava, värikoodattu koon mukaan Tubifast Strech ® putkisidos (OneMed Oy)



- putkisidos
- koot värikoodattu raidalla
- pitää sidokset paikoillaan ilman kompressiota
- joustaa pituus ja leveyssuuntaan
- lateksiton
- soveltuu kipsin alle
- Hengittävä

Koot:

Punainen 3,5cmx10m

(SET2434, G104453)

Vihreä 5cmx10m

(SET2436, G108992)

Sininen 7,5cmx10m

(SET2438, G108993)

Keltainen 10,75cmx10m

(SET2440, G108994)

Putkisidos, tukeva, rulla Tubigrip® (OneMed Oy)



Tuoteseloste:

- Puuvilla, elastaani, polyamidi. Sisältää luonnonkumia. Ei sisällä hartsia eikä PVC:tä
- Elastinen, putkimainen tukisidos, jota on saatavilla eri levyisinä eri kehon osiin. Käytetään kiinnitys- ja tukisidoksena
- voidaan leikata ja käyttää samalla potilaalla useamman kerran
- Voi pestä

Käyttöaiheet:

- Palovammat
- nivelen nyrjähdys, venähdys
- Ruhjeet
- kipsin poisoton jälkeen
- Turvotus (katso kohta kompressiohoitona)
- Pehmytkudosvammat
- Tukisiteenä kierrettävän sidoksen vaihtoehtona

Käyttö kompressiohoitona:

- Kompressiohoidossa ainoana sidoksena käytettäessä saa aikaan 10–15 mmHg:n paineen
- Leikkaa tukisidosta kaksi kertaa raajan pituisen palan
- Vedä sukka paikalleen kaksin kerroin, alimmainen kerros jää 2-3 cm korkeammalle

Koot:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| A 4,5cm x10m | (SET1435, G100414-1) |
| C 6,75cm x10m | (SET1443, G104764-1) |
| D 7,5cm x10m (käsi) | (SET1437, G100415) |
| E 8,75cm x10m (iso jalka) | (SET1434, G104643) |
| F 10cm x10m (polvi) | (SET1438, G100416) |
| G 12cm x10m (suuri/reisi) | (SET1439, G100417) |

Kompressioside, vähäelastinen Rosidal K ® (Mediq Suomi Oy)



- Yksittäispakattu, vähäelastinen ihonvärinen kompressiosidos
- Kompressiohoitoon laskimonsuffiensiä sairastaville potilaille
- Ruhjevammojen ja venähdysten tukihoitoon
- Venyvyys 90%
- Pesu 95 asteessa
- Voidaan steriloida

Koot:

- 6cm x5m
- 8cm x5m (22250, G100423)
- 10cm x5m (22251, G100425)
- 12cm x5m (22252, G100426)

Laastarit

- kuitukangaslaastari
- hyvin ilmaa ja kosteutta läpäisevä
- pehmeä ja mukautuva
- saatavana rullana, sekä valmiiksi leikattuna ja automaatti
- lapsille oma laastari

Leukoplast Sensitive (OneMed Oy)

19 x 72 mm (SNW7645003, G104215)

Dermoplast Universal vedenkestävä, muovi (Mediplast Fenno Oy)

19 x 72mm (30-535151, G112394)

Leukoplast, injektioaastari (OneMed Oy)

2 x 4 cm (SNW7645026, G104214)

Leukoplast, pala kuitukangas (OneMed Oy)

1,9 x 7,2 cm (SNW7645003, G104215)

Salvequick, laastariautomaatti (OneMed Oy)

45xmuovi 40xkangas 1kpl (CED490700, G111329-1)

Nexcare Soft Kids design, lastenlaastari (OneMed Oy)

(MMM0920NLW, G101965)

Putkiside, sormisidos, Singlefix ® (OneMed Oy)

- Sideharsolla päällystetty, superlon pehmustettu Materiaali puuvilla, elastaani
- Käytetään peittosidoksena sormien vammoissa
- Ei sovellu suoraan haavalle ensisijaiseksi sidokseksi
- Pakkaus sisältää 100kpl yksittäispakattua steriiliä sormisidosta

Koot:

Small	(00570019, G104770-2)
Medium	(FRA00570012, G104769)
Large	(FRA00570004, G104768)



Putkiside, sormi-/varvassidos, Adaptic digit ® (MediQ Suomi Oy)



- Ihoa vasten kiinnittymätön silikonipäällysteinen kangas, jonka päällä putkiside, joka rullataan alimmaiseksi tulevan silikonisidoksen päälle
- Tarttumaton
- Voi leikata
- Muotoutuu sormen/varpaan anatomian mukaan
- Lievien – vaikea-asteisten sormivammojen hoitoon, kuten: Laseraatiot ja abraasiot, traumavammat, kynsien irtoamiset, ommelsaumat.
- Voidaan käyttää ensisijaisena tai toissijaisena sidoksena

Sormisidos:

ø 2cm	(MAD003, G111313-1)
ø 2,4cm	(MAD013, G111313-2)
ø 2,8cm	(MAD023, G111313-3)
ø 3cm	(MAD042, G111313-4)

Varvassidos:

Yksi koko	(MAD062, G111313-5)
-----------	---------------------

Haavapussi

Eakin Haavapussi (B. Braun Medical Oy)



- Lateksiton
- Ihoystävällinen haavansuojalevy
- Leikattava haava-aukko haavan koon mukaan
- Erittäin runsaasti erittävälle haavalle, kun sidokset eivät vaihtoehtona

Koot:

60x86mm

(839267, G102832)

Kiinnitysteippi, silikon Mepitac® (Mölnlycke Health Care Oy)



- pehmeä, silikonikiinnitteinen teippi
- hauras ja herkkäihoisille
- kalvotaustainen, vedenkestävä, hengittävä
- suunniteltu sidosten ja sairaalavälineiden kiinnittämiseen
- hikoileminen heikentää kiinnitystä
- ei suositella käyttöä valtimokatetreissa

Koot:

2 cmx3m	(298300, G101960)
4 cmx1,5m	(298400, G101961)

Haavasidos, arvenhoito, steriili Mepiform® (Mölnlycke Health Care Oy)



- Itsekiinnittyvä silikonisidos arpien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn
- sopii hypertrofisille ja keloidisille arville
- voi leikata

Käyttö:

- Parantuneelle, arpeutuneelle haavalle/iholle
- Ei avonaiselle haavapinnalle
- Asetetaan kuivalle, puhtaalle iholle arven päälle ja ulottuen n. 1 cm arpea ympäröivälle iholle
- Poistetaan suihkun ajaksi
- Voidaan poistaa ja asettaa uudelleen kiinnitysominaisuuksien heikkenemättä
- Vaihdetaan 3.-7. päivän välein tai kun sidos ei enää kiinnity kunnolla ihoon

Koot:

4 x 30 cm	(293100, G101511)
5 x 7,5 cm	(293200, G110747)
10 x 18 cm	(293400, G101512)

Kiinnitys katetri/dreeni/trakeostomia/kanyyli

Tegaderm CHG I.V (Mediq Suomi Oy)

i.v. kanyylin kiinnittämiseen, antimikrobinen

8,5x11,5cm (1657R, G112332-1)

10x12cm (1658R, G112332-2)



Naso-Fix ® aikuisten (Convatec Oy)

Nenä-mahaletkun kiinnitys teippi nenän varteen

(625M-L, G104425)



Kiinnitys katetri/dreeni/trakeostomia/kanyyli

Katetrin kiinnitys

Flexi-Trak ® (ConvaTec Oy) 110x38mm
(37449, G109929-4)




StatLock PICC Plus (Becton Dickinson Oy)
(PIC0220CE, G109929-3)



Drain-Fix ® (Convatec Oy), dreeneihin

Small (680M, G100380)

Large (685M, G100380-1)

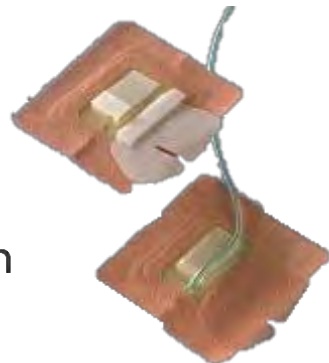


Biopatch ® levy 2,5 cm, Katetrien juureen (Steripolar Oy)

- 4mm reikä (44150, G103809)
- 7mm reikä (44152, G103810)



Mepore IV 8x9cm IV-kanyylin kiinnitykseen (OneMed Oy)
(MLN274200, G101529)

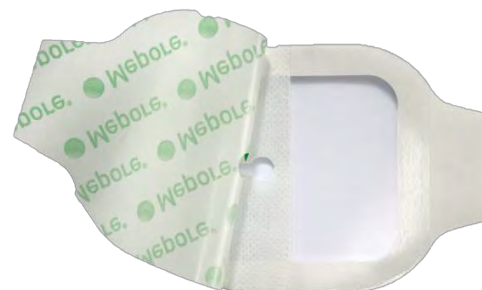

Asentohoitotyyny, kantapään alueen painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito Levabon Heel Up ® (Ossano Scandinavia Oy)



- Ilmatäytteinen muotoiltu asentohoitotyyny
- Keventää painetta kantapäältä ja malleolien kohdalta
- Ihoystävällinen, lämpöä haihduttava ja kosteutta imevä materiaali
- Potilaskohtainen

Heel up medium (70007, G103035-1)

Heel up käsipumppu (76004, G111755-1)

Lampaanvilla Mills (OneMed Oy)



- Käytetään ihon hautumien hoitoon esim. taivealueet ja varpaiden välit
- Imee kosteutta
- Nopeuttaa paranemista

Käyttö:

- Otetaan noin sormenpaksuinen osio lampaanvillaa ja asetetaan kuvan mukaisesti kiristämättömästi varpaiden väliin tai asetetaan taivealueelle.

Koot:

100g

(MIL23001, G112024-2)

Kertakäyttöinen alipaineimulaite AVELLE® (Convatec)



- Kertakäyttöinen alipaineimulaite/alipaineistettu haavasidos
- ei säiliötä
- Käyttöaika 30 vrk, jonka aikana pattereita voi joutua vaihtamaan
- Vähän erittäville, pienemmille haavoille (alle 250ml/vko)
- Profylaktisena hoitona steriilille, suljetulle leikkaushaavalle ehkäisemään haavainfektiota
- Sidosten vaihto 1-2 kertaa viikossa erityksen mukaan.
- Mikäli haava syvempi kuin 0,5cm, haavan pohjalle täytteeksi Aquacel-sidos tai nauha, tarvittaessa Aquacel Ag Plus
- Huomioi sidoksen koon valinnassa sidoksen sisämitat, imuportti terveeseen ihon puolelle, haavan yläpuolelle

Koot:

Avelle-laite	(421551, G111794-1)
Laukku	(446650, G109526-2)
Sidos 12x21	(421554, G109522)
Sidos 12x31	(421555, G109525-8)
Sidos 16x16	(421552, G109523)
Sidos 16x21	(421553, G109524)
Sidos 12x41	(422155, G109525-9)
Sidos 21x26	(422156, G109525-11)
Sidos 26x26	(422157, G109525-10)

Alipaineimuuhoido Renasys Go/Touch ®



Alipaineimuhoidolaite

- Imee haavaeritettä, poistaa haavakudoksesta turvotusta ja bakteereita, kiihdyttää granulaatiokudoksen muodostumista, kiihdyttää uudisverisuoni muodostusta
- haavalle luodaan alipaine pumpun avulla
- Voidaan toteuttaa kotihoitonakin
- Sidosten vaihto 3 kertaa viikossa

Huomioitavaa

- Aloitetaan lääkärin määräyksestä
- Ei sovellu runsaasti vertavuotavalle haavalle, ei suurten verisuonien päälle, ei syöpähaavalle, ei infektoituneelle haavalle, ei runsaan katteisille haavoille (haavarevisio ennen hoidon aloitusta)

Kertakäyttöiset keräyssäiliö Go

- 300 ml (66800914, G103547)
- 750 ml (66800916, G103548)

Kertakäyttöinen keräyssäiliö Touch

- 300ml (66801273, G103547-1)
- 800ml (66801274, G103264)

Sidossetti (harsosidoksella)

- S (66800933, G103247)
- M (66800934, G103248)
- L (66800935, G103249)

Vaahtosidossetti

- S (66800794, G109020-2)
- M (66800795, G109020-3)
- L (66800796, G109020-4)
- XL (66800797, G109020-5)

Muita

- Softport irtoportti (66800799, G103560)
- Y-Liitin (66800971, G109894-1)
- Kiinnittyvä geelinauha (66801082, G109527-2)
- Vaahtopala (66801021, G109528-3)
- Kiinnityskalvo L (20x30cm) (66800394, G109529-2)
- Kiinnityskalvo XL (40x60cm) (66800853, G109529-3)
- Renasys Go laukku (66800162, G109031-1)
- Renasys Touch laukku (66801277, G109031-2)

Haavahoitotuotetoimittajat

B. Braun Medical Oy

OneMed Oy

Smith & Nephew Oy

Suomen 3M Oy

Steripolar Oy

Oy Verman Ab – tilaukset OneMed kautta

Essity Oy/ BSN Medical Ab

Conva Tec Oy

Emicaid Oy

Mediq Suomi Oy

Mölnlycke Health Care Oy

Mediplast Fenno Oy