

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1.</p>  <p>Valmistele potilas ja tarvikkeet. Käytä laskimoverinäytteenottoon siipineulaa ja Safe pico Aspirator® ruiskua.</p> | <p>2.</p>  <p>Tunnustele laskimosuoni, käytä staasia mahdollisimman vähän. Desinfioi näytteenottoaikka, anna pistospaikan kuivua ja tee pistos siipineulalla.</p> | <p>3.</p>  <p>Ota hukkaputki, ennen verinäytteiden ottamista. Mikäli potilaasta on muita näytteitä, noudatetaan veriputkien näytteenottojärjestystä. Verikaasuruisku on verrattavissa hepariiniputkiin.</p> | <p>4.</p>  <p>Ota ruiskusta korkki pois ja paina ruiskulla neulan kumitiivistettä tiiviisti koko näytteenoton ajan.</p> |
| <p>5.</p>  <p>Vedä ruiskuun verta männän avulla näytteenottotilavuuteen 0,7-1,5 ml. Laita välittömästi näytteenoton jälkeen korkki ruiskuun ja jatka kohtaan 6.</p> | <p>6.</p>  <p>Kierrä korkkia puoli kierrosta. Pidä ruiskua pystysuorassa ja napauta ruiskua, jotta ruiskun männän päälle jäänyt ilma nousee ylös. Paina ilma ja veri korkkiin asti, kunnes tunnet vastusta.</p> | <p>7.</p>  <p>SEKOITA ruisku kääntelemällä vähintään 10x ylösalaisin tai laita se sekoittajaan.</p> | <p>8.</p>  <p>Liimaa ruiskuun potilaan pyyntötarra ja lähetä se putki-postilla välittömästi laboratorioon osoitteeseen 4718.</p> |