

Huuhtelu- ja desinfiointikoneen
DEKO 190, DEKO LC,190 LC (iX) tarkistuslista - yksikön omavalvonta

Yksikkö:								Laitemalli:												Vikatilanteessa ilmoitus (+koodi) koneen huollosta vastaavalle henkilölle!																								
Kuukausi/vuosi:																																												
Nimikirjaimet																																												
Tehtävät / pvm								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Joka päivä, kun konetta käytetään								x tehdyn tarkistuksen kohtaan																																				
Pesuaineen tarkistus merkitse huopakynällä pesuaineen nestepinta annosastiaan																																												
Pesurien ja suuttimien tarkistus tarkista, että pesurit pyörivät																																												
tarkista että suuttimien reiät ovat auki																																												
Koneen yleisilme tarkista, että koneen yleisilme on siisti ja tuoksu puhdas																																												
Vähän käytössä oleva laite lyhyt desinfiioiva pesuohjelma päälle kerran päivässä																																												
Kerran viikossa																																												
kaada ämpärillinen vettä kammioon ja tarkista, että vesi laskee heti viemäriin																																												
viemäriaukon harjaus wc-harjalla																																												
Kahden viikon välein ja aina pesuaineakanisterin vaihdon yhteydessä																																												
Pesuainejärjestelmän huuhtelu suorita pesuainejärjestelmän huuhtelu kuumalla vedellä																																												
kanisterin vaihdon yhteydessä kannuun avauspäivämäärä																																												
Kuukausittain suuttimien ja pesurien puhdistus																																												
HUOM!								<ul style="list-style-type: none"> - DEKO 190 LC-koneet: pesuaineletkuston huuhtelusta tulee huolehtia säännöllisesti - Vähällä käytössä olevan koneen pesuaineakanisteriin tehdään merkintäviiva harvemmin. Pesukammion kirkkaus, tarvittaessa kalkin poisto. 																																				
Laitteen vuosihuolto:								laitevalmistajan oma huolto tai valmistajan valtuuttama ja kouluttama huoltoliike tai organisaation oma koulutuksen saanut tekniikan asiantuntija.																																				