

**AMMATTIKÄYTTÖÖN TULEVAN KETOAINEMITTARIN KÄYTTÖÖNOTTO-
TARKISTUS HOITOYKSIKÖSSÄ**

Jokaiselle uudelle ammattikäyttöön tulevalle ketoainemittarille on tehtävä käyttöönottotarkistus. Täytä jokaiselle mittarille oma lomake. Määritä molemmat kontrollitasot 3 kertaa ja katso, että tulokset ovat tavoitearvojen sisällä. Mikäli tulokset ovat tavoitearvojen sisällä, voidaan mittari ottaa käyttöön. Mikäli tulokset ovat rajojen ulkopuolella, mittaria ei voida ottaa käyttöön. Lomake säilytetään samassa kansiossa mittarin laaduntarkkailutulosten kanssa mittarin käyttöiän. **Kopio lomakkeesta lähetetään vieritutkimuksia ohjaavalle henkilölle.**

Laitteen /mittarin tiedot:

nimi: _____

sarjanumero: _____

mittarin "lempinimi"(esimB21K1) _____

Kontrollitiedot:

Kontrolli L -taso Lot (erä) nro:_____ exp_____ tavoite_____

Kontrolli M -taso Lot (erä) nro:_____ exp_____ tavoite_____

Määrittämissä käytettävien reagenssien /liuskojen tiedot:

Lot (erä) nro: _____ exp: _____

tulos taso 1	tulos taso 2

Testaus suoritettu:

nimi _____ pvm _____/____ 20_____

Kopio lomakkeesta lähetetty vieritutkimuksia ohjaavalle henkilölle pvm_____/____ 20_____