

Clinitek Status+ virtsaliuska-analysaattori


Lyhyt käyttöopas



Testikasetti



Liuska

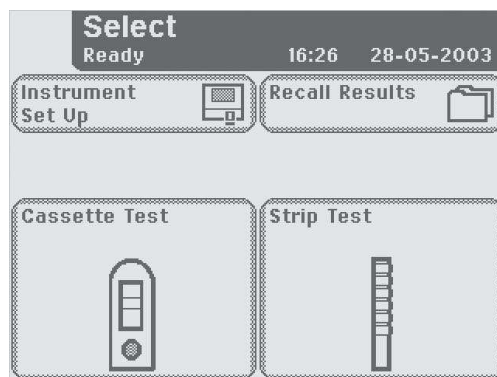


1. Tarkista että adapteri (testipöytä) on oikein päin (kasetti tai liuska)

2. Ota esiin haluttu testikasetti tai liuska

3. Valitse testi painamalla haluttua kuvaa.

4. Syötä potilaan ID, jos käytössä.

5. Paina *Start*. Sinulla on 8 sekuntia aikaa seuraaviin toimenpiteisiin:

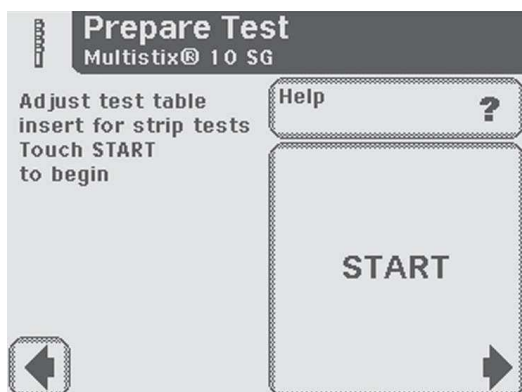

7. Aseta liuska testipöydälle
Aseta reagenssiliuska alustan pidikeuraan niin, että testikohdat ovat ylöspäin. Työnnä liuskapidikeuran päähän saakka.

6. Kasta liuska virtsanäytteeseen, vedä liuskaa näyteastian reunaan pitkin, jotta ylimääräinen virtsa valuu pois. Kuivaa vielä liuskan reuna imupaperia



8. Tulos näkyy ruudulla kun määrittys on valmis.
Paina *Done* (valmis), kun haluat palata aloitusvalikkoon

vasten.



Results	
Test sequence number: 0010	1 of 2
Glucose.....	Negative
Bilirubin.....	Negative
Ketone.....	Negative
Specific Gravity.....	1.025
Blood.....	Trace-intact
pH.....	5.0
Protein.....	Negative
Urobilinogen.....	0.2 mg/dL
Nitrite.....	Negative
Leukocytes.....	Negative

Liite 7_Tarjousnumero: S188042014

1.1.2011

Päivittäinen puhdistaminen



1. Vedä lukualusta ulos.
2. Irrota testipöytä. HUOM: Älä koske valkoiseen kalibrointikenttään.




3. Kostuta pumpulipuikko vedellä ja pyyhi testipöytä ja lukualusta huolellisesti.
4. Huuhtelee lukualustan ja testipöydän molemmat puolet juoksevan veden alla (ei kalibrointikenttää).



5. Kuivaa huolellisesti nukkaamattomalla liinalla. HUOM: Älä koske valkoiseen kalibrointikenttään!
6. Tarkista että valkoinen kalibrointikenttä on puhdas ja naarmuton. Tarvittaessa puhdista se puhtaalla vedellä kostutetulla pumpulipuikolla.
7. Anna kalibrointikentän kuivua itsekseen ja tarkista sen kunto uudelleen.
8. Aseta lukualusta takaisin paikalleen ja työnnä se puoliksi sisään.

Paperirullan vaihto

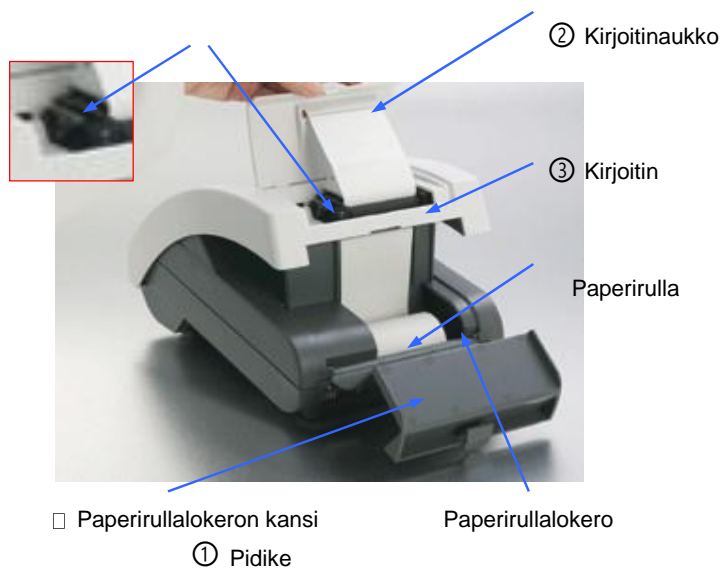

④

Asiakastilaukset

diagnostics.fi@siemens.com

Puhelin 010 511 3434 / faksi 010 511 3983

Help Desk

Puhelin 010 511 3232 / faksi 010 511 3983 dx-

helpdesk-fi.healthcare@siemens.com

1. Avaa kirjoittimen ↑ ja paperirullalokeron □ kansi.
2. Vapauta paperipidike ←.
3. Aseta uusi paperirulla paikalleen ↓.
4. Vie paperi kirjoittimen aukon läpi →.
5. Lukitse paperipidike ←.
6. Vie paperi kirjoitinaukon ↑ läpi.
7. Sulje kirjoitinkansi ↑ ja paperirullalokeron □ kansi.

SIEMENS


Siemens Healthcare Diagnostics Oy

Puh. 010 511 2100

Tarkat ohjeet Clinitek Status+ -analysointilaitteen käyttöohjeessa



Rev 310507

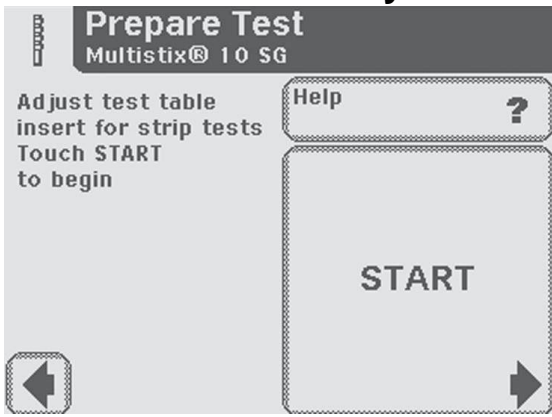

5. Tryck på START. Du har 8 sekunder tid att göra


följande:

kant mot t.ex. en papershandduk. **Placera** stickan i insatsen

6. **Doppa** stickan i urinprovet så att alla testfält blir våta, **drag** stickan längs kanten på provburken, så att överlopps urin rinner bort. Läska av stickan



7. Placera stickan i insatsen så att testfält är uppåt. Skjut stickan till insatsens slut.

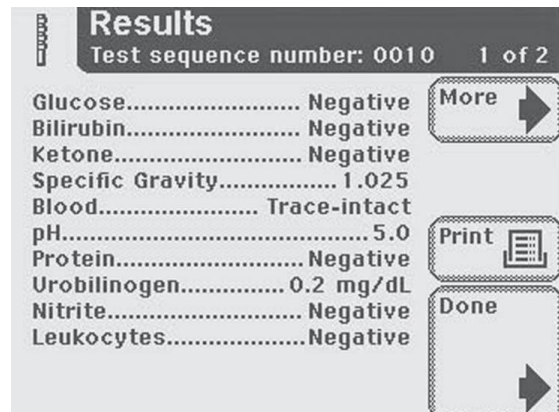

8. När bestämningen är klar, syns resultat på skärmen. Tryck på Klar när du vill återgå till huvudskärmen.

Kort bruksanvisning


Rev 310507



Testkassett

Sticka

1. Kontrollera att insatsen är rätt svängd (kassett eller sticka)
2. Tag fram den önskade urinanalysstickan.

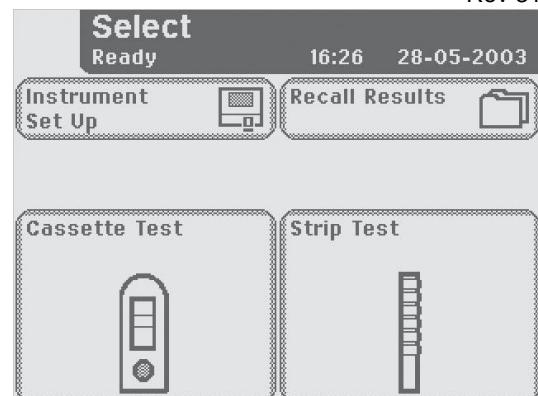

3. Välj test med att trycka på den önskade bilden (Analysera sticka)
4. För in patient-ID om du har den.



Daglig rengöringen



1. Drag ut testsläden.
2. Tag bort insatsen. OBS: Rör inte i det vita kalibreringsområdet.




3. Doppa en bompullstops i vatten och torka insatsen och testlådan noggrant.
4. Skölj testlådan och insatsen båda sidor under rinnande vatten (inte kalibreringsområdet).



5. Torka noggrant med en mjuk duk som inte luddar. OBS: Rör inte det vita kalibreringsområdet.
6. Kontrollera att det vita kalibreringsområdet är rent och fritt från skråmor. Om det är nödvändigt rengör det med en bomullstopps doppad i rent vatten.
7. Låt kalibreringsområdet torka av sig själv och kontrollera dess skick på nytt.
8. Sätt testsläden tillbaka på sin plats och skjut in den till hälften.

Liite 7_Tarjousnumero:
S188042014

Byte av printerpapper

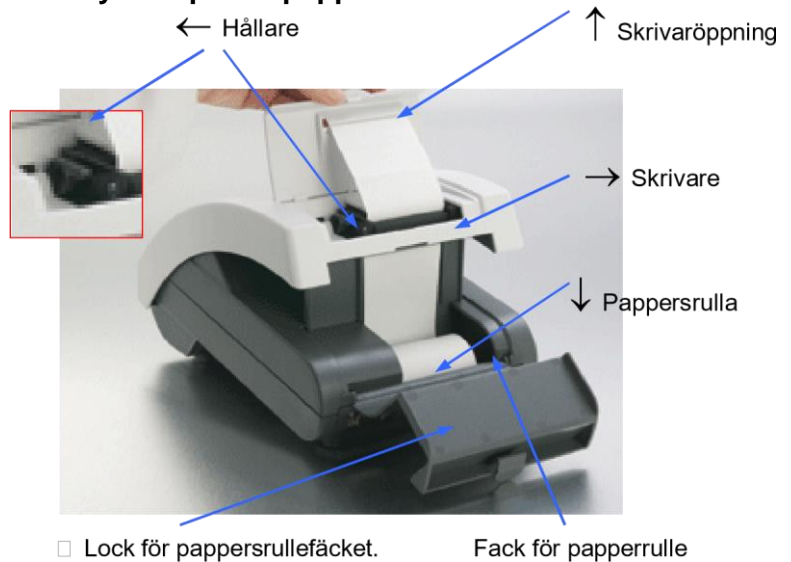

1. Öppna skrivarhöljet N och pappersrullemagasinets lock.
2. Lösgör pappershållararmen M.
3. Sätt den nya pappersrullen på plats P.
4. För pappret genom skrivaröppningen O.
5. Lås pappershållararmen M.
6. För pappret genom skrivaröppningen N.
7. Sätt fast skrivarhöljet N och locket för pappersrullemagasinet .

Beställning

diagnostics.fi@siemens.com Telefon

010 511 3434 / fax 010 511 3983

Help Desk

Telefon 010 511 3232 / fax 010 511 3983 dx-

helpdesk-fi.healthcare@siemens.com

SIEMENS

Siemens Healthcare Diagnostics Oy
Tel. 010 511 2100

