




# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb

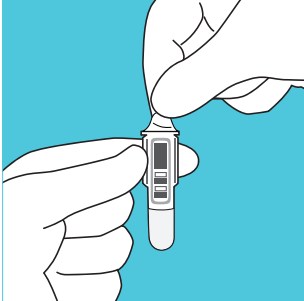


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Varo läikyttämästä puskuria. Älä koske kyvetin alaosaan.

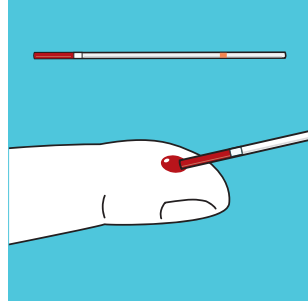

**2** Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyyn päähän. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

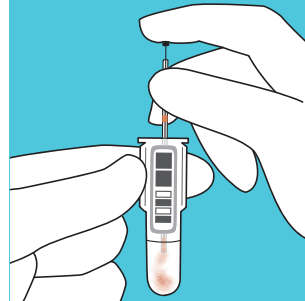


**3** Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuri-liuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

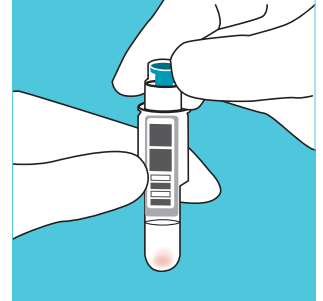

**4** Sulje kyvetti huolellisesti wrCRP-reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".

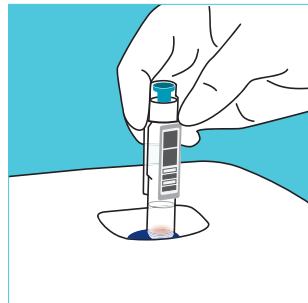

**6** Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



**7** Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle, ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go wrCRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb



Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa:  
säilyy pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka



Reagenssi-  
korkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C:  
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avaamisen jälkeen 2–25 °C: **6 kuukautta**



Kyvetit

Avaamattomat pakkaukset 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen  
Säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**



Avattu  
kyvetti

Anna puskurin lämmentä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista  
Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta  
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan



CRP-  
kontrollit

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **2 kuukautta**



Hb-  
kontrolli

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **1 kuukausi**

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi  
050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510  
tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi  
www.quikread.com

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go wrCRP, 50 testiä sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146521	1701126
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146255	1701127
QuikRead go CRP Control Low	153765	1703060
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656	1702845
QuikRead go 10 µl kapillaarit, 50 kpl	147851	1701128
QuikRead männät, 50 kpl	67966	67966
QuikRead go -laite	135867	-