

# CoaguChek XS käyttöohje

## Testin suorittaminen




**Huom! Ennen mittauksen aloitusta asiakkaan tulee pestä kätensä lämpöisellä vedellä, jotta verenkierto vilkastuisi. Kädet tulee myös kuivata hyvin.**



1. Käynnistä CoaguChek XS -laite työntämällä testiliuska laitteeseen (testiliuskan punaiset nuolet kohti laitetta). Testiliuska on oikein paikallaan, kun laite antaa äänimerkin. Tarkista laitteen päivämäärä, kellonaika ja lataus. **Sulje testiliuskapurkin kansi välittömästi otettuasi testiliuskan purkista.**



2. Tarkista, että käyttämäsi testiliuskan eränumero vastaa laitteen näyttämää eränumeroa. **Vahvasta eränumero** painamalla **M-näppäintä**. Mikäli laitteessa ei ole koodisiru paikallaan, laite antaa error-ilmoituksen. Aseta käyttämästäsi testiliuskapakkauksesta koodisiru laitteen vasemmassa sivussa olevaan syvennykseen.

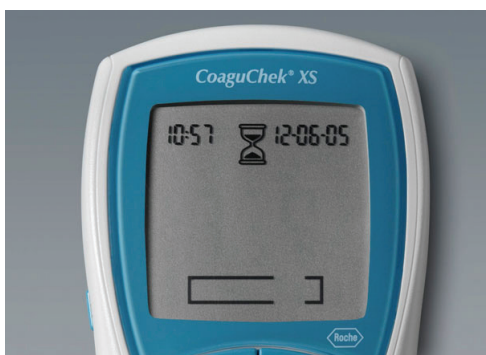


3. Laite lämmittää testiliuskaa niin kauan, kun tiimalasin kuva vilkkuu näytössä.



4. Kun näytössä vilkkuu pisaran kuva, näytteen voi lisätä. Näytettä on aikaa annostella 120 s.

## Testin suorittaminen, jatkoa

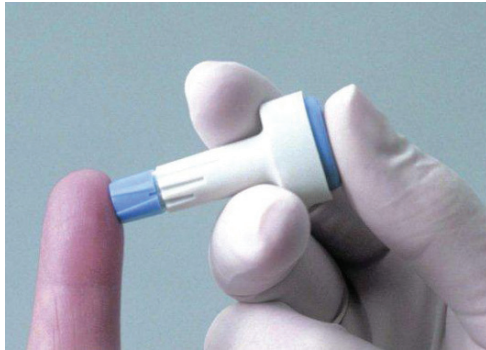


5. Tee pisto esim. Safe-T-Pro-Plus turvalansetilla hyvin pestyyn, lämmitettyyn ja kuivattuun sormenpäähän. Älä purista sormenpäättä tarpeettomasti. Älä käytä desinfiointiainetta sormen puhdistamiseen.




6. Imeytä heti ensimmäinen veripisara liuskalle kapillaari-imulla. Kosketa veripisaralla kevyesti testiliuskas reunaan läpinäkyvän testialueen kohdalta. Veri imeytyy liuskalle. Pidä veripisara kiinni testiliuskassa, kunnes laite antaa äänimerkin ja pisaran kuva häviää näytöltä. **Verta ei saa lisätä liuskalle.**



Näytteen voi myös tiputtaa testiliuskalle.

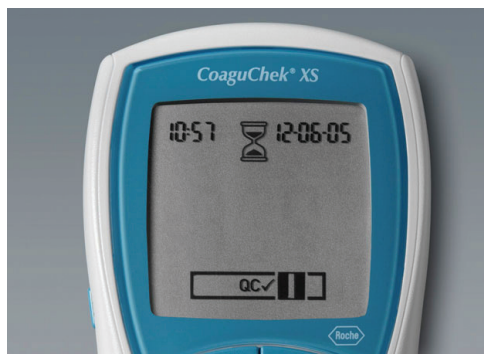

7. Mikäli laitteen suorittama automaattinen laadunvalvontatesti on onnistunut, varsinainen mittaus käynnistyy. Näytössä vilkkuu tiimalasin kuva, kunnes tulos ilmestyy näytöllön.

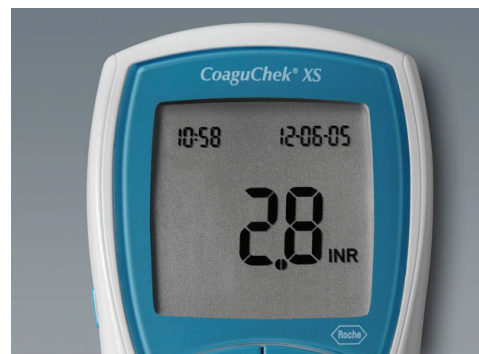

8. Tulos ilmestyy näytölle ja tallentuu laitteen muistiin. Poista liuska, ja laite on valmis uuteen mittaukseen.