

ACCU-CHEK INSTANT

Verensokerin mittaaminen ammattikäytössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella



1. Desinfioi kädet ja käytä suojakäsineitä.




2. Puhdista potilaan iho alkoholia sisältävällä ihonpuhdistuslapulla ja anna ihon kuivua hyvin.



3. Ota liuska purkista kuivilla käsillä. Mittari käynnistyy, kun liuska asetetaan mittariin. Ota näyte kun näyttöön ilmestyy pisarasymboli.



4. Tee pistos kertakäyttöisellä lansetilla keskisormen tai nimettömän reuna-alueelle, pyyhi ensimmäinen pisara pois.

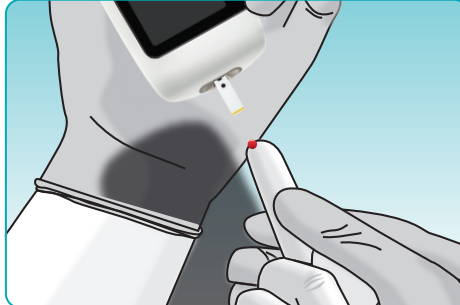


5. Kosketa veripisaraa testiliuskan keltaisella reunalla. Älä aseta verta testiliuskan päälle.




6. Poista testiliuska pisarasta, kun näyttöön ilmestyy tiimalasisymboli, älä lisää näytettä.



7. Hävitä käytetty testiliuska toimipaikan toimintaohjeiden mukaisesti. Käytä testiliuskan vapautinta.

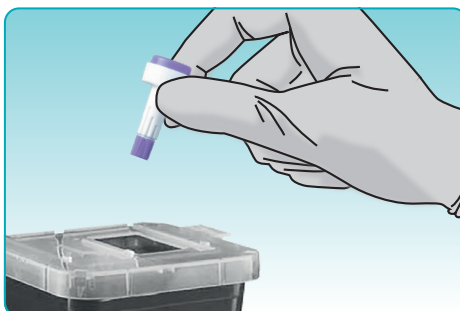

8. Hävitä käytetty lansetti toimipaikan toimintaohjeiden mukaisesti.

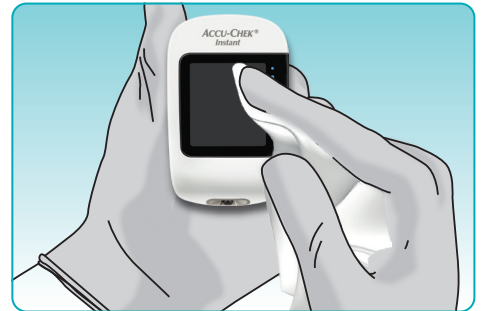

9. Mittarin voi puhdistaa 70% isopropanolilla tai elektronisten laitteiden pintapyyhintäliinoilla. Liuskaporttiin ei saa mennä puhdistusainetta.

Verensokerimittariin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä maksuttomaan asiakaspalveluumme 0800-92066 tai fi.accuchek@roche.com.

Lisätietoja verensokerimittarista ja turvalanseteista löydät niiden käyttöohjeista.

Yhteistyössä: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Seinäjoen keskussairaala, kliininen kemia
Yhteystiedot: vieritestit@hyvaep.fi, puh. 06 4155495