

Vitrex Flex 3 -lansetin (valittu hankintakaudelle 1.5.2025-30.4.2029) käyttöohje:

Pistosyvyys valitaan kolmesta eri vaihtoehdosta



1. pistosyvyys 1,3 mm


Kun tarvitaan vain vähän näytettä esim. glukoosimittaukset "ohutnahkaisilta", lapset yli 3 kk (5–15 kg) sormenpäänäytteet.

2. pistosyvyys 1,8 mm

Kun tarvitaan enemmän näytettä, esim. glukoosimittaukset aikuisilta ja Hb-, Leukosyytti-, CRP- ja INR-mittaukset lapsilta (yli 15 kg)

3. pistosyvyys 2,3 mm

Hb-, Leukosyytti-, CRP- ja INR-mittaukset aikuisilta

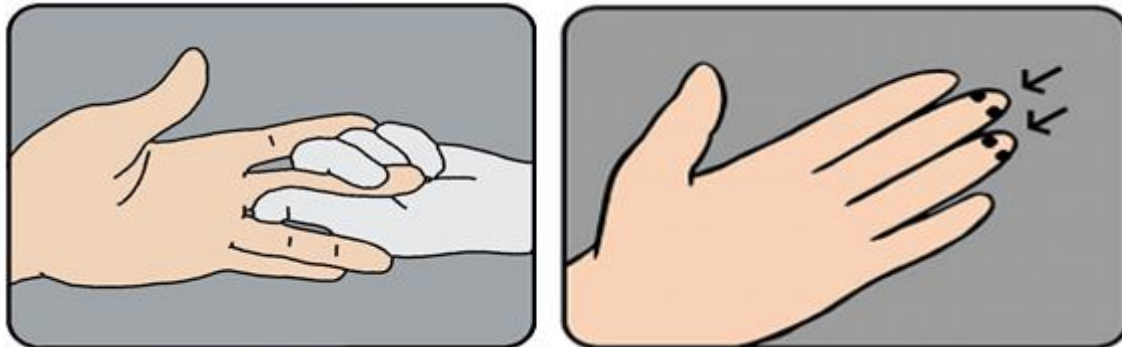

1. Tarvittaessa lämmitä näytteenottopaikka.
2. Puhdista näytteenottopaikka (70 % etanoli tai vastaava), anna kuivua.
3. **Kierrä** suojakorkki irti.
4. Käännä pistosyvyyden valitsin tarvitsemasi syvyyden kohdalle.
5. Ota oikea pisto-ote ja purista pistopaikka piukaksi ja punaiseksi, paina lansetin kärki napakasti pistokohtaan ja laukaise painamalla lansettia sormeaa vasten.
6. Hellitä ote ja ota sen jälkeen näytteet oikeassa järjestyksessä pisaroista. INR 1. pisara, 2. pisara Gluk, CRP, ketoaineet, 3.–4. pisara Hb ja leukosyytit.
7. Hävitä jätteet asianmukaisesti.