

Pikaohje HbA1c-määrityksen tekemiseen DCA Atellica-laitteella sw 2.1

Laita virta päälle sekä moduuliin, että ohjaimeen. Kun näytön keskiympyrässä lukee valmis, laite on käyttövalmis

Potilasnäytteen tekeminen

- Paina keskiympyrää
- Valitse potilastesti
- Valitse HbA1c
- Ota näyte näytteenottimeen ja laita se testikasettiin, testi on aloitettava 4 minuutin sisällä
- Laita testikasetti kasettikoteloon ja poista folionauha. Paina samalla testikasettia pohjaan, jotta se ei liiku kasettikotelossa. Testi on aloitettava 15 sekunnin sisällä reagenssikasetin asettamisesta
- Laita luukku kiinni, määrittäminen alkaa
- Skannaa tai näpyttele potilastunniste
- Kun testi on valmis, keskiympyrään tulee teksti tulokset saatavilla. Kuittaa tulos alareunasta painamalla valmis ja poista testikasetti kasettikotelosta

Kontrollinäytteen tekeminen

- Paina keskiympyrää
- Valitse kontrollitesti
- valitse oikea taso ja eränumero, jos sitä ei ole valmiina skannaa kontrollipaketin kortista.
- Valitse jatka
- Ota kontrollinäyte näytteenottimeen ja laita se testikasettiin, testi on aloitettava 4 minuutin sisällä
- Laita testikasetti kasettikoteloon ja poista folionauha. Paina samalla testikasettia pohjaan, jotta se ei liiku kasettikotelossa. Testi on aloitettava 15 sekunnin sisällä reagenssikasetin asettamisesta
- Laita luukku kiinni, määrittäminen alkaa
- Kun testi on valmis, keskiympyrään tulee teksti tulokset saatavilla. Paina keskiympyrää. Kuittaa tulos alareunasta painamalla valmis ja poista testikasetti kasettikotelosta.